

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE- SEDE CENTRO

Dirección CARRERA 9 N° 11-74

Municipio SOGAMOSO

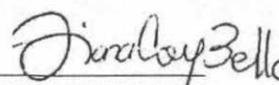
Fecha de Elaboración 3 de Enero de 2019

Vigencia 2019

Recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura. \$ 103.482.693

CONCEPTO	UBICACIÓN	PERIODICIDAD	FECHA			RESPONSABLES	ACTIVIDADES
			DD	MM	AA		
<b>1. EDIFICIOS.</b>	Laboratorio clínico	Anual	14-21	04	2019	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros)
	Esterilización	Anual	14-21	04	2019	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
	Farmacia	Anual	14-21	04	2019	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
	Odontología Tercer piso PYP	Anual	22-28	02	2019	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
	Consultorio 305	Anual	22-28	02	2019	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
	Vacunación 205	Anual	22-28	02	2019	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
<b>2. INSTALACIONES FÍSICAS</b>	Cubierta área administrativa.	Anual	14-21	03	2019	Contratista	Revisión y reparación de goteras remplazo teja barro rotas.
	Fachada edificio PYP	Anual	14-21	05	2019	Contratista	Estuco y pintura de exteriores.
	Oficinas administrativas						Estuco y vinilo tres manos en muros
	Sala de juntas personal administrativo.	Anual	14-21	05	2019	Contratista	Revisión y reparación cielo raso en dry wall, incluye vinilo dos manos

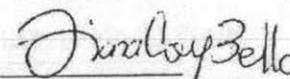
  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

3.SISTEMAS DE REDES	REDES HIDROSANITARIAS (Red de tuberías, registros, llaves terminales)	Cuatrimestral	16-23	03	2019	Técnico Mantenimiento.	Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios. Calibración al sistema de presión (hidro flow).
				07	2019	Técnico Mantenimiento.	Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios. Calibración al sistema de presión (hidro flow).
				11	2019	Técnico Mantenimiento.	Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios. Calibración al sistema de presión (hidro flow).
	Sala de sistemas Internet, radios de comunicación, señal tv	Diaria de Lunes a Viernes.	25	01-12	2019	Ing Sistemas.	Monitoreo de continuidad en la transmisión de datos, verificación de los pach panel y pach core estén en correcto funcionamiento.
	Sala de sistemas Teléfono	Anual	25	05	2019	Técnico Mantenimiento.	Verificación de líneas telefónicas.



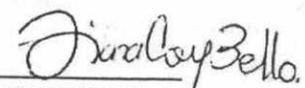
DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

	Transferencia eléctrica, cajas Eléctricas, toma corrientes y tacos del edificio PYP, ambulatorio y administrativo.	Semestral	25	05	2019	Técnico Mantenimiento.	Revisión de acometidas eléctricas a tableros de protección, revisión de bornes de fases neutros y tierras, tomas de voltajes de línea y de fase, pruebas de tacos de protección que estén en buen funcionamiento, pruebas de circuitos en conectividad y voltaje. Polo a tierra, revisión de voltajes, cambio toma corrientes por deterioro, cambio luminarias.
	Transformador y breakers generales de tablero.		23-30	11	2019		Mantenimiento de fusibles de protección en arranque principal, limpieza de bornes y fusibles tipo hh en disyuntor principal, pruebas de aislamiento y voltaje en transformador tipo pedestal de 112.5 kva, mantenimiento y ajuste de borneras general en disyuntor, transformador y transferencia. Revisión y mantenimiento de breaker generales en tablero general de protección, mantenimiento preventivo transferencia.
4. AREAS ADYACENTES	Cercos perimetrales	Anual	1	05	2019	Técnico Mantenimiento.	Instalación de cercos perimetrales.
	Áreas verdes y jardines	Bimensual	1	02	2019	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			1	04	2019	Técnico	Poda, deshierbé, fumigada de

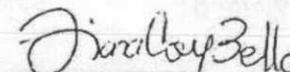
  
 DIRECTOR/GERENTE

  
 JEFE DE MANTENIMIENTO

						Mantenimiento.	hierba y pasto
			1	06	2019	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			1	08	2019	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			1	10	2019	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			1	12	2019	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
	Tanques de reserva	Semestral	1	06	2019	Contratista	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
		Semestral	1	12	2019	Contratista	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE- SEDE MONQUIRA

Dirección CARRERA 9 N° 11-74

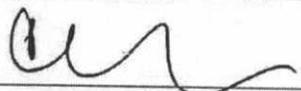
Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 3 de Enero de 2019

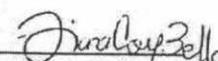
Vigencia 2019

Recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura. \$ 103.482.693

CONCEPTO	UBICACIÓN	PERIODICIDAD	FECHA			RESPONSABLES	ACTIVIDADES
			DD	MM	AA		
1. EDIFICIOS	Consultorio 104 (1) odontología Monquirá	Anual	19- 26	4	2019	Contratista	demolición pañetes (incluye retiro)
	Consultorio 104 (1) odontología Monquirá	Anual	19- 26	4	2019	Contratista	suministro e instalación de enchape en porcelana olimpia 20*20 o similar
	Consultorio 104 (1) odontología Monquirá	Anual	19- 26	4	2019	Contratista	estuco y vinilo tres manos en muros
	Consultorio 104 (2) odontología monquirá	Anual	19- 26	4	2019	Contratista	Demolición pañetes (incluye retiro)
	Consultorio 104 (2) odontología monquirá	Anual	19- 26	4	2019	Contratista	pañete impermeabilizado 1:3
	Consultorio 104 (2) odontología monquirá	Anual	19- 26	4	2019	Contratista	estuco y vinilo tres manos en muros
	Consultorio 104 (2) odontología monquirá	Anual	19- 26	4	2019	Contratista	cielo raso en dry wall, incluye vinilo dos manos
	Baño de	Anual	19- 26	4	2019	Contratista	cielo raso en dry wall, incluye vinilo

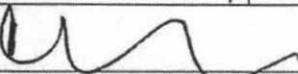


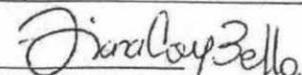
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO



	monquira							
	Hall de acceso entrada principal Monquira	Anual	19-26	4	2019	Contratista	suministro e instalación de enchape en porcelana Olimpia 20*20 o similar	
	Sala de espera Monquira	Anual	19-26	4	2019	Contratista	suministro e instalación cubierta teja ondulada traslucida 0.83*3.05	
	Sala de espera Monquira	Anual	19-26	4	2019	Contratista	cielo raso en dry wall, incluye vinilo dos manos	
	Hall interno de consultorios Monquira	Anual	19-26	4	2019	Contratista	cielo raso en dry wall, incluye vinilo dos manos	
	Antejardín Monquira	Anual	19-26	4	2019	Contratista	pintura fachada en vinilo para exteriores	
	Antejardín Monquira	Anual	19-26	4	2019	Contratista	pintura para rejas esmalte 3 manos blanco	
<b>3. SISTEMAS DE REDES</b>	Sanitarias (Acueducto, aguas residuales, negra)	Anual	21	04	2019	Contratista, Técnico Mantenimiento.	Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias.	
	Internet, radios de comunicación, señal tv	Diario, de Lunes a Viernes	1-30	1-12	2019	Ing Sistemas.	Monitoreo de continuidad en la trasmisión de datos, verificación de los pach panel y pach core estén en correcto funcionamiento.	
	Teléfono	Anual	25	05	2019	Técnico Mantenimiento.	Verificación de líneas telefónicas.	
	Eléctrica	Anual	25	05	2019	Técnico Mantenimiento.	Revisión polo a tierra, revisión de voltajes, cambio toma corrientes por deterioro, cambio luminarias.	
<b>4. AREAS ADYACENTES</b>	Vías de circulación	Anual	25	05	2019	Técnico Mantenimiento.	Pintura y resanes.	
	Cercos perimetrales	Anual	1	05	2019	Técnico Mantenimiento.	Verificación de pds de energía eléctrica.	
	Áreas verdes y	Cuatrimstral	1	02	2019	Técnico	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y	

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

	jardines		1	06	2019	Mantenimiento. Técnico Mantenimiento.	pasto Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			1	10	2019	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
	Tanques de reserva	Semestral	1	06	2019	Contratista	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
		Semestral	1	12	2019	Contratista	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

## PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE - Centro

Dirección Carrera 9 N° 11 74

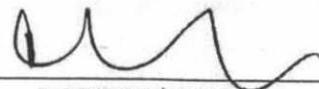
Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 4 de Enero de 2019

Vigencia 2019

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. \$ 75.111.290

NOMBRE DEL EQUIPO	LOCALIZACION	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	DD	MM	AA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES
BASCULA PESA BEBES	AC_239 CONSULTORIO_M EDICO_203_PYP	0478	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> </ul>
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS	AC_239 CONSULTORIO_M EDICO_203_PYP	0475	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
FONENDOSCOPIO	AC_239 CONSULTORIO_M EDICO_203_PYP	0476	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación acústica.</li> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	



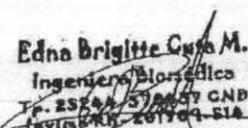
DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cely M.  
Ingeniera Biomedica  
C.P. 25244 / 570007 CNP  
Firma: 20190104-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
DOPPLER FETAL	AC_239 CONSULTORIO_M EDICO_203_PYP	1932	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de voltaje y amperaje del equipo.</li> </ul>
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba acústica del Transductor.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
TALLIMETRO	AC_239 CONSULTORIO_M EDICO_203_PYP	1289	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
INFANTOMETRO DE MADERA	AC_239 CONSULTORIO_M EDICO_203_PYP	0030	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AC_239 CONSULTORIO_M EDICO_203_PYP	0206	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometo y brazaletes.</li> </ul>
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar mediciones de verificación.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO	AC_239 CONSULTORIO_M EDICO_203_PYP	0217	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometo y brazaletes.</li> </ul>
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar mediciones de verificación.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>

  
DIRECTOR/GERENTE

  
Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
T. 2524457007 CND  
INSTRUMENTOS  
INSTRUMENTOS

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DE PISO	AC_239 CONSULTORIO_M EDICO_203_PYP	0344	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_239 CONSULTORIO_M EDICO_203_PYP	1882	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante.
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
TALLIMETRO	AC_239 CONSULTORIO_M EDICO_203_PYP	1097	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
EQUIPO DE ORGANOS MARCA WELCH ALLYN	AC_248 CONSULTORIO_M EDICO_208_PYP	0776	SEMESTRAL	18 AL 22	03	2019	Ingeniera biomedica.	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
			SEMESTRAL	16 AL 20	09	2019	Ingeniera biomedica	



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
T. 25244 5700 97 C.N.D.  
INSTRUMENTACIÓN - SIA

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
FONENDOSCOPIO	AC_248 CONSULTORIO_M EDICO_208_PYP	0518	SEMESTRAL	18 AL 22	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación acústica.</li> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> </ul>
			SEMESTRAL	16 AL 20	09	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
DOPPLER FETAL	AC_248 CONSULTORIO_M EDICO_208_PYP	1933	SEMESTRAL	18 AL 22	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de voltaje y amperaje del equipo.</li> </ul>
			SEMESTRAL	16 AL 20	09	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba acústica del Transductor.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
LAMPARA CUELLO DE CISNE	AC_248 CONSULTORIO_M EDICO_208_PYP	0769	SEMESTRAL	18 AL 22	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Limpieza externa e interna del equipo.</li> </ul>
			SEMESTRAL	16 AL 20	09	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prueba de impedancia y voltajes.</li> <li>• Verificar intensidad lumínica.</li> <li>• prueba de funcionamiento con el operador</li> </ul>
INFANTOMETRO	AC_248 CONSULTORIO_M EDICO_208_PYP	1131	SEMESTRAL	18 AL 22	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
			SEMESTRAL	16 AL 20	09	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO	AC_248 CONSULTORIO_M EDICO_208_PYP	0218	SEMESTRAL	18 AL 22	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas.</li> <li>• Verificar estado de pera, válvula de alivio, manómetro y brazaletes.</li> </ul>
			SEMESTRAL	16 AL 20	09	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar mediciones de verificación.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>



DIRECTOR/GERENTE

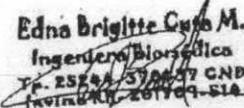
Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
C.P. 25244-5700-57 CND  
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica - SISA

JEFE DE MANTENIMIENTO



Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS	AC_249 CONSULTORIO_M EDICO_209_PYP	0535	SEMESTRAL	18 AL 22	03	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				16 AL 20	09	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AC_249 CONSULTORIO_M EDICO_209_PYP	0064	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas.</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaete.</li> <li>• Realizar mediciones de verificación.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	
FONENDOSCOPIO	AC_249 CONSULTORIO_M EDICO_209_PYP	0381	SEMESTRAL	18 AL 22	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación acustica.</li> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				16 AL 20	09	2019	Ingeniera biomedica	
DOPPLER FETAL	AC_249 CONSULTORIO_M EDICO_209_PYP	1931	SEMESTRAL	18 AL 22	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de voltaje y amperaje del equipo.</li> <li>• Prueba acustica del Transductor.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				16 AL 20	09	2019	Ingeniera biomedica	

  
DIRECTOR/GERENTE

  
Edna Brigitte Cuya M.  
Ingeniera Biomedica  
R. 25204 570007 CND  
Ingeniera 201709-518

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
TALLIMETRO	AC_249 CONSULTORIO_M EDICO_209_PYP	1891	SEMESTRAL	18 AL 22	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				16 AL 20	09	2019	Ingeniera biomedica	
INFANTOMETRO DE MADERA	AC_249 CONSULTORIO_M EDICO_209_PYP	0034	SEMESTRAL	18 AL 22	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				16 AL 20	09	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO	AC_249 CONSULTORIO_M EDICO_209_PYP	0298	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometo y brazaete.</li> <li>• Relizar mediciones de verificacion.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_249 CONSULTORIO_M EDICO_209_PYP	0803	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
TALLIMETRO	AC_249 CONSULTORIO_M EDICO_209_PYP	1101	SEMESTRAL	18 AL 22	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				16 AL 20	09	2019	Ingeniera biomedica	



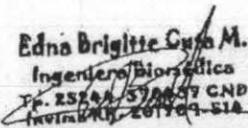
DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
T.P. 25600 510007 CND  
Ingeniera 201709-218

JEFE DE MANTENIMIENTO

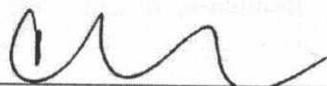
Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
BASCUA DIGITAL DE PISO	AC_252 CONSULTORIO_M EDICO_301_PYP	1285	SEMESTRAL	26 AL 29	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> </ul>
			SEMESTRAL	23 AL 37	09	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCUA DE PISO	AC_252 CONSULTORIO_M EDICO_301_PYP	1272	SEMESTRAL	26 AL 29	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				23 AL 37	09	2019	Ingeniera biomedica	
				22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS	AC_252 CONSULTORIO_M EDICO_301_PYP	0558	SEMESTRAL	26 AL 29	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.</li> </ul>
				23 AL 37	09	2019	Ingeniera biomedica	
FONENDOSCOPIO	AC_252 CONSULTORIO_M EDICO_301_PYP	0562	SEMESTRAL	26 AL 29	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación acústica.</li> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de estado de campana</li> </ul>

  
DIRECTOR/GERENTE

  
Edna Brigitte Cuzco M.  
Ingeniera Biomedica  
T. 25244 5744 77 CND  
Inventario 2019-518

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				23 AL 37	09	2019	Ingeniera biomedica	de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
DOPPLER FETAL	AC_252 CONSULTORIO_M EDICO_301_PYP	1930	SEMESTRAL	26 AL 29	03	2019	Ingeniera biomedica	• Verificación física del equipo. • Verificación de voltaje y amperaje del equipo.
				23 AL 37	09	2019	Ingeniera biomedica	• Prueba acústica del Transductor. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento
LAMPARA CUELLO DE CISNE	AC_252 CONSULTORIO_M EDICO_301_PYP	0561	SEMESTRAL	26 AL 29	03	2019	Ingeniera biomedica	• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos. • Limpieza externa e interna del equipo.
				23 AL 37	09	2019	Ingeniera biomedica	• prueba de impedancia y voltajes. • Verificar intensidad luminica. • prueba de funcionamiento con el operador
TENSIOMETRO	AC_252 CONSULTORIO_M EDICO_301_PYP	0223	SEMESTRAL	26 AL 29	03	2019	Ingeniera biomedica	• Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.
			SEMESTRAL	23 AL 37	09	2019	Ingeniera biomedica	• Realizar mediciones de verificación. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_252 CONSULTORIO_M EDICO_301_PYP	0804	SEMESTRAL	26 AL 29	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpier con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				23 AL 37	09	2019	Ingeniera biomedica	martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante



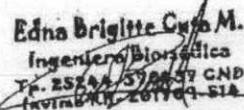
DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
T. 2574457647 CNB  
Inviene 201704-518

JEFE DE MANTENIMIENTO

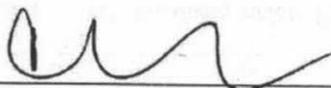
Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
TALLIMETRO	AC_252 CONSULTORIO_M EDICO_301_PYP	1102	SEMESTRAL	26 AL 29	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				23 AL 37	09	2019	Ingeniera biomedica	
BASCUA DIGITAL DE PISO	AC_253 CONSULTORIO_M EDICO_302_PYP	1283	SEMESTRAL	26 AL 29	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> </ul>
			SEMESTRAL	23 AL 37	09	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS	AC_253 CONSULTORIO_M EDICO_302_PYP	0568	SEMESTRAL	26 AL 29	03	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				23 AL 37	09	2019	Ingeniera biomedica	
FONENDOSCOPIO	AC_253 CONSULTORIO_M EDICO_302_PYP	0570	SEMESTRAL	26 AL 29	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación acústica.</li> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> </ul>
				23 AL 37	09	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO	AC_253 CONSULTORIO_M EDICO_302_PYP	0224	SEMESTRAL	26 AL 29	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas.</li> <li>• Verificar estado de pera, válvula de alivio, manómetro y brazaletes.</li> </ul>

  
DIRECTOR/GERENTE

  
Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
T.F. 25744/570647 CND  
Instituto de Salud 2019-518

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			SEMESTRAL	23 AL 37	09	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Relizar mediciones de verificacion.</li> <li>•Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_253 CONSULTORIO_M EDICO_302_PYP	0822	SEMESTRAL	26 AL 29	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante.
				23 AL 37	09	2019	Ingeniera biomedica	
TALLIMETRO	AC_253 CONSULTORIO_M EDICO_302_PYP	1103	SEMESTRAL	26 AL 29	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				23 AL 37	09	2019	Ingeniera biomedica	
BASCULA PESA BEBES	AC_255 CONSULTORIO_N UTRICION_304_P YP	0559	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>•verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>•revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>•Verificacion de pesos.</li> <li>•Limpieza y desinfeccion.</li> <li>•Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	02 AL 11	10	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA DE PISO	AC_255 CONSULTORIO_N	0991	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>•verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> </ul>



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
C.P. 23244 / 570697 CND  
Ingeniera 2019 - SIA

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	UTRICION_304_P YP		SEMESTRAL	02 AL 11	10	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>Verificación de pesos.</li> <li>Limpieza y desinfección.</li> <li>Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS	AC_255 CONSULTORIO_N UTRICION_304_P YP	0388	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				02 AL 11	10	2019	Ingeniera biomedica	
FONENDOSCOPIO	AC_255 CONSULTORIO_N UTRICION_304_P YP	0376	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación acustica.</li> <li>Verificación física del equipo.</li> <li>Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>Limpieza del equipo.</li> <li>Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				02 AL 11	10	2019	Ingeniera biomedica	
TALLIMETRO	AC_255 CONSULTORIO_N UTRICION_304_P YP	1290	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				02 AL 11	10	2019	Ingeniera biomedica	
INFANTOMETRO DE MADERA	AC_255 CONSULTORIO_N UTRICION_304_P YP	0035	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				02 AL 11	10	2019	Ingeniera biomedica	

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Caza M.  
Ingeniera Biomedica  
C.P. 25244-5720-7 CNP  
Instituto 2019-01-31-514

\_\_\_\_\_  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
TENSIOMETRO	AC_255 CONSULTORIO_N UTRICION_304_P YP	0273	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.</li> </ul>
				02 AL 11	10	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar mediciones de verificacion.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_255 CONSULTORIO_N UTRICION_304_P YP	0807	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				02 AL 11	10	2019	Ingeniera biomedica	
TALLIMETRO	AC_255 CONSULTORIO_N UTRICION_304_P YP	1104	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				02 AL 11	10	2019	Ingeniera biomedica	
BASCULA DE PISO	AC_254 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_30 3_PYP	1273	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>• Verificacion de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	02 AL 11	10	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	
UNIDAD ODONTOLOGICA SILLON ELECTRICO	AC_254 CONSULTORIO_O	0572	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar voltaje y amperaje.</li> <li>• intensidades de lámpara.</li> <li>• verificar funcionamiento de válvulas.</li> </ul>



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
T. 23244 57007 CND  
INSTRUMENTAL 2019-2020 SIA

JEFE DE MANTENIMIENTO

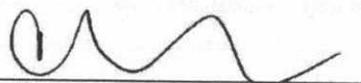
Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	DONTOLOGIA_30 3_PYP			02 AL 11	10	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verificar succión y desagües.</li> <li>• verificar sistema de regulación</li> <li>• lubricacion de partes móviles.</li> <li>• Limpieza de filtros de succion.</li> <li>• verificar componentes electronicos y tablero de control.</li> <li>• Verificacion de fugas.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_254 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_30 3_PYP	0403	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de intensidad luminica.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Verificacion de componentes electronicas.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AL 11	10	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
AMALGAMADOR	AC_254 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_30 3_PYP	0574	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar voltaje de entrada, verificar funcionamiento panel frontal, revisión porta amalgama, revisión selector de velocidad, revisar partes roscadas, revisar funcionamiento de motor, verificación correcto funcionamiento, limpieza general.</li> </ul>
				02 AL 11	10	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
INSERTO CAVITRON 25K-TFI-10	AC_254 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_30 3_PYP	1300	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Limpieza de conductos de presion.</li> <li>• Verificacion de componentes electronicos.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AL 11	10	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>

Edna Brigitte Cury M.  
Ingeniera Biomedica  
C.R. 25244/572437 CND  
Instituto de Tecnología SIA

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
MICROMOTOR	AC_254 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_30 3_PYP	1303	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AL 11			10	
PIEZA DE MANO	AC_254 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_30 3_PYP	0377	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AL 11			10	
PIEZA DE MANO	AC_254 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_30 3_PYP	1069	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AL 11			10	
CONTRA ANGULO	AC_254 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_30 3_PYP	1293	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AL 11			10	
CONTRA ANGULO	AC_254 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_30 3_PYP	0576	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AL 11			10	
AUTOCLAVE 3 BANDEJAS	AC_230 ESTERILIZACIÓN _USI_CENTRO	0861	SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de física del equipo.</li> <li>• Verificación de fugas.</li> <li>• Limpieza de cámara.</li> </ul>



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
T. 25744 57007 CND  
Inventario 201703-518

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			SEMESTRAL	02 AL 11	10	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba de voltajes y amperaje.</li> <li>• Verificación de componentes mecánicos y electrónicos.</li> <li>• Verificación de funcionamiento de valvulas.</li> <li>• Verificación de alarmas.</li> <li>• Verificación de funcionamiento de control de temperatura.</li> <li>• Verificación de temperatura y tiempo.</li> <li>• Prueba de control biológico y termica.</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar validacion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
			SEMESTRAL	01 AL 05	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de física del equipo.</li> <li>• Verificación de fugas.</li> <li>• Limpieza de camara.</li> <li>• Prueba de voltajes y amperaje.</li> <li>• Verificación de componentes mecánicos y electrónicos.</li> <li>• Verificación de funcionamiento de valvulas.</li> <li>• Verificación de alarmas.</li> <li>• Verificación de funcionamiento de control de temperatura.</li> <li>• Verificación de temperatura y tiempo.</li> <li>• Prueba de control biológico y termica.</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y</li> </ul>
AUTOCLAVE 3 BANDEJAS	AC_230 ESTERILIZACIÓN _USI_CENTRO	2024	SEMESTRAL	02 AL 11	10	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba de voltajes y amperaje.</li> <li>• Verificación de componentes mecánicos y electrónicos.</li> <li>• Verificación de funcionamiento de valvulas.</li> <li>• Verificación de alarmas.</li> <li>• Verificación de funcionamiento de control de temperatura.</li> <li>• Verificación de temperatura y tiempo.</li> <li>• Prueba de control biológico y termica.</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y</li> </ul>

Edna Brigitte Cely M.  
Ingeniera Biomedica  
C.R. 23264-570007 CND  
Ingeniera Biomedica - 2019-2024

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	Nº de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								externa. • Prueba de funcionamiento.
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar validación del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
INCUBADORA	AC_230 ESTERILIZACIÓN _USI_CENTRO	0859	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de temperatura.</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Limpieza externa e interna del equipo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• prueba de impedancia y voltajes.</li> </ul> </li> <li>• Verificación de alarmas.</li> <li>• Verificar sistemas de control.</li> <li>• prueba de funcionamiento con el operador</li> </ul>
				04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	
PIANO CUENTA CELULAS	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0645	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	limpiar con jabones no sulfatantes, oxidantes ni corrosivos.
				04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	
BAÑO CEROLÓGICO	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0638	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	De acuerdo a protocolo de proveedor. Equipo intervenido por casa matriz.
				04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	
AUTOCLAVE	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0649	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de física del equipo.</li> <li>• Verificación de fugas.</li> <li>• Limpieza de cámara.</li> </ul>



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
C.P. 25244-5700-57 CND  
Invalm 2019-03-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba de voltajes y amperaje.</li> <li>• Verificación de componentes mecánicos y electrónicos.</li> <li>• Verificación de funcionamiento de valvulas.</li> <li>• Verificación de alarmas.</li> <li>• Verificación de funcionamiento de control de temperatura.</li> <li>• Verificación de temperatura y tiempo.</li> <li>• Prueba de control biológico y térmica.</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
CENTRIFUGA DINAC CLAY ADAMAN MOD: S/2890231	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0647	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de física del equipo.</li> <li>• Verificación de fugas.</li> <li>• Limpieza de cámara.</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba de voltajes y amperaje.</li> <li>• Verificación de componentes mecánicos y electrónicos.</li> <li>• Verificación de funcionamiento de valvulas.</li> <li>• Verificación de alarmas.</li> <li>• Verificación de funcionamiento de control de temperatura.</li> <li>• Verificación de temperatura y tiempo.</li> <li>• Prueba de control biológico y térmica.</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
T. 252445786-57 CND  
Ingeniera 2017-01-31A

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
CENTRIFUGA 24 TUBOS	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0660	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biologica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion de fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de fugas.</li> <li>• Limpieza de camara.</li> <li>• Prueba de voltajes y amperaje.</li> <li>• Verificacion de componentes mecanicos y electronicos.</li> <li>• Verificacion de funcionamiento de valvulas.</li> <li>• Verificacion de alarmas.</li> <li>• Verificacion de funcionamiento de control de temperatura.</li> <li>• Verificacion de temperatura y tiempo.</li> <li>• Prueba de control biologico y termica.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion interna y externa.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biologica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion de fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de fugas.</li> <li>• Limpieza de camara.</li> <li>• Prueba de voltajes y amperaje.</li> <li>• Verificacion de componentes mecanicos y electronicos.</li> <li>• Verificacion de funcionamiento de valvulas.</li> <li>• Verificacion de alarmas.</li> <li>• Verificacion de funcionamiento de control de temperatura.</li> <li>• Verificacion de temperatura y tiempo.</li> <li>• Prueba de control biologico y termica.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion interna y externa.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
CENTRIFUGA DIGITAL 24 TUBOS	AC_177 LABORATORIO CENTRO	1997	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biologica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion de fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de fugas.</li> <li>• Limpieza de camara.</li> <li>• Prueba de voltajes y amperaje.</li> <li>• Verificacion de componentes mecanicos y electronicos.</li> <li>• Verificacion de funcionamiento de valvulas.</li> <li>• Verificacion de alarmas.</li> <li>• Verificacion de funcionamiento de</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biologica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion de fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de fugas.</li> <li>• Limpieza de camara.</li> <li>• Prueba de voltajes y amperaje.</li> <li>• Verificacion de componentes mecanicos y electronicos.</li> <li>• Verificacion de funcionamiento de valvulas.</li> <li>• Verificacion de alarmas.</li> <li>• Verificacion de funcionamiento de</li> </ul>

  
 DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.  
 Ingeniera Biologica  
 T. 2520 5700 97 CND  
 INVIEM 2019-2019-518  
 JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>control de temperatura.</li> <li>• Verificación de temperatura y tiempo.</li> <li>• Prueba de control biológico y térmica.</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA	AC_177 LABORATORIO CENTRO	1996	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De acuerdo a protocolo de proveedor. Equipo intervenido por casa matriz.</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	
INCUBADORA	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0677	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de temperatura.</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Limpieza externa e interna del equipo.</li> <li>• prueba de impedancia y voltajes.</li> <li>• Verificación de alarmas.</li> <li>• Verificar sistemas de control.</li> <li>• prueba de funcionamiento con el operador</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	
MICROSCOPIO BINOCULAR	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0651	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de enfoque en lentes.</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Limpieza externa e interna del equipo.</li> <li>• prueba de impedancia y voltajes.</li> <li>• Limpieza de lentes.</li> <li>• Verificación de alarmas.</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	

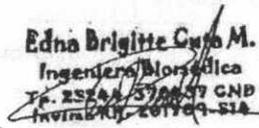
Edna Brigitte Cordero M.  
 Ingeniera Biomedica  
 T.F. 25204570007 CND  
 Inventario 2019-2020 SIA

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar sistemas de control.</li> <li>• prueba de funcionamiento con el operador</li> </ul>
MICROSCOPIO BINOCULAR	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0652	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de enfoque en lentes.</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Limpieza externa e interna del equipo.</li> <li>• prueba de impedancia y voltajes.</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de lentes.</li> <li>• Verificación de alarmas.</li> <li>• Verificar sistemas de control.</li> <li>• prueba de funcionamiento con el operador</li> </ul>
MICROSCOPIO	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0678	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de enfoque en lentes.</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Limpieza externa e interna del equipo.</li> <li>• prueba de impedancia y voltajes.</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de lentes.</li> <li>• Verificación de alarmas.</li> <li>• Verificar sistemas de control.</li> <li>• prueba de funcionamiento con el operador</li> </ul>
AGITADOR DE MAZZINE	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0636	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Limpieza externa e interna del equipo.</li> <li>• prueba de impedancia y voltajes.</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de alarmas.</li> <li>• Verificar sistemas de control.</li> <li>• prueba de funcionamiento con el operador.</li> </ul>

  
DIRECTOR/GERENTE

  
Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
C.R. 25244 / 570007 GNB  
Ingeniera Biomedica 201709-218  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
AGITADOR BACULANTE	AC_177 LABORATORIO CENTRO	1995	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Limpieza externa e interna del equipo.</li> <li>• prueba de impedancia y voltajes.</li> <li>• Verificación de alarmas.</li> <li>• Verificar sistemas de control.</li> <li>• prueba de funcionamiento con el operador.</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	
HORNO DE SECADORA	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0661	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De acuerdo a protocolo de proveedor. Equipo en tiempo de garantía.</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	
EQUIPO DE QUIMICA A15	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0654	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	De acuerdo a protocolo de proveedor. Equipo intervenido por casa matriz.
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	
EQUIPO HUMACOUNT PARA HEMATOLOGIA	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0637	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	De acuerdo a protocolo de proveedor. Equipo intervenido por casa matriz.
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	
ANALIZADOR DE ORINA URIT 500C	AC_177 LABORATORIO CENTRO	1342	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	De acuerdo a protocolo de proveedor. Equipo intervenido por casa matriz.
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	

Edna Brigitte Cely M.  
Ingeniera Biomedica  
T. 25204570007 CND  
INVIMEX-201704-512

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
LAMPARA CUELLO DE CISNE	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0655	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Limpieza externa e interna del equipo.</li> <li>• prueba de impedancia y voltajes.</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar intensidad luminica.</li> <li>• prueba de funcionamiento con el operador</li> </ul>
PIPETA BOHECO	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0641	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de fisuras o posibles daños físicos.</li> <li>• Verificar estado de embolo, piston y demas elemntos mecanicos.</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento con el operador.</li> </ul>
			ANUAL	02 AL 06	09	2019	Empresa comprolab	realizar validacion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
PIPETA BOHECO	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0639	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de fisuras o posibles daños físicos.</li> <li>• Verificar estado de embolo, piston y demas elemntos mecanicos.</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento con el operador.</li> </ul>
			ANUAL	02 AL 06	09	2019	Empresa comprolab	realizar validacion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
PIPETA HUMAN	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0657	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de fisuras o posibles daños físicos.</li> <li>• Verificar estado de embolo, piston y</li> </ul>

  
DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Guzmán M.  
Ingeniera Biomedica  
C.R. 25244-3700-37 CND  
Ingeniera Biomedica - 201704-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	demas elemntos mecanicos. • Verificar fugas. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento con el operador.
			ANUAL	02 AL 06	09	2019	Empresa comprolab	realizar validacion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
			SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	• Verificacion de fisuras o posibles daños fisicos. • Verificar estado de embolo,piston y demas elemntos mecanicos.
PIPETA HUMAN	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0659	SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	• Verificar fugas. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento con el operador.
			ANUAL	02 AL 06	09	2019	Empresa comprolab	realizar validacion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
			SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	• Verificacion de fisuras o posibles daños fisicos. • Verificar estado de embolo,piston y demas elemntos mecanicos.
PIPETA HUMAN	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0656	SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	• Verificar fugas. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento con el operador.
			ANUAL	02 AL 06	09	2019	Empresa comprolab	realizar validacion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
PIPETA HUMAN	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0658	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	• Verificacion de fisuras o posibles daños fisicos. • Verificar estado de embolo,piston y

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
T. 2524457407 CND  
Ingeniera 201704-514

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	demas elemntos mecanicos. • Verificar fugas. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento con el operador.
			ANUAL	02 AL 06	09	2019	Empresa comprolab	realizar validacion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
PIPETEADOR	AC_177 LABORATORIO CENTRO	0643	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	• Verificacion de fisuras o posibles daños fisicos. • Verificar estado de embolo, piston y demas elemntos mecanicos.
				04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	• Verificar fugas. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento con el operador.
			ANUAL	02 AL 06	09	2019	Empresa comprolab	realizar validacion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
ELECTROCARDIOGRAMA	AC_184 CONSULTORIO_PR OCEDIMIENTOS_1 06_USI_CE	0722	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	• Verificacion de fisuras o posibles daños fisicos. • Verificar estado de embolo, piston y demas elemntos mecanicos.
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	• Verificar fugas. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento con el operador.
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
NEBULIZADOR	AC_184 CONSULTORIO_PR	0790	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	• Verificacion fisica del equipo. • Verificacion de volatje y amperaje. • Verificacion de funcionamiento de



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cely M.  
Ingeniera Biomedica  
C.P. 25244 570097 CND  
Inscripción 201703-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	OCEDIMIENTOS_1 .06_USI_CE		SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• compresor. • Verificación de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Cambio de filtro.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
NEBULIZADOR	AC_184 CONSULTORIO_PR OCEDIMIENTOS_1 06_USI_CE	0792	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de voltaje y amperaje.</li> <li>• Verificación de funcionamiento de compresor. • Verificación de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Cambio de filtro.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de funcionamiento de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Cambio de filtro.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
PULSOXIMETRO	AC_184 CONSULTORIO_PR OCEDIMIENTOS_1 06_USI_CE	0723	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje en equipos electrónicos,</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AC_184 CONSULTORIO_PR OCEDIMIENTOS_1 06_USI_CE	0203	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas.</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relizar mediciones de verificación.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
I.P. 25744/570647 CND  
Instituto 201709-518

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO	AC_184 CONSULTORIO_PR OCEDIMIENTOS_1 06_USI_CE	0277	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaleta.</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar mediciones de verificación.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
FONENDOSCOPIO	AC_184 CONSULTORIO_PR OCEDIMIENTOS_1 06_USI_CE	0359	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación acústica.</li> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> </ul>
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
TALLIMETRO	AC_184 CONSULTORIO_PR OCEDIMIENTOS_1 06_USI_CE	1099	SEMESTRAL	06 AL 10	05	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
			SEMESTRAL	04 AL 08	11	2019	Ingeniera biomedica	
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	AC_179 CONSULTORIO_M EDICO_102_USI_C ENTRO	1876	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
T.E. 2524437447 GNB  
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
DOPPLER FETAL	AC_179 CONSULTORIO_M EDICO_102_USI_C ENTRO	1927	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de voltaje y amperaje del equipo.</li> </ul>
				11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba acústica del Transductor.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
FONENDOSCOPIO	AC_179 CONSULTORIO_M EDICO_102_USI_C ENTRO	1874	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación acústica.</li> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> </ul>
				11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_179 CONSULTORIO_M EDICO_102_USI_C ENTRO	1888	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	
BASCULA	AC_179 CONSULTORIO_M EDICO_102_USI_C ENTRO	1882	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> </ul>
				11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBES	AC_176 CONSULTORIO_C YD_1_CENTRO	1916	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> </ul>

Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
C.P. 25244370007 CNB  
INSTRUMENTAL 201904-518

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>Verificacion de pesos.</li> <li>Limpieza y desinfeccion.</li> <li>Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AC_179 CONSULTORIO_M EDICO_102_USI_C ENTRO	1963	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar fugas .</li> <li>Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometo y brazalete.</li> </ul>
				11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relizar mediciones de verificacion.</li> <li>Limpieza del equipo</li> <li>prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO	AC_176 CONSULTORIO_C YD_1_CENTRO	0292	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar fugas .</li> <li>Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometo y brazalete.</li> </ul>
				11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relizar mediciones de verificacion.</li> <li>Limpieza del equipo</li> <li>prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
ESTADIOMETRO	AC_179 CONSULTORIO_M	1891	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.

  
DIRECTOR/GERENTE

  
Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
C.R. 25242-5700-47 CND  
Inventado 201703-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	EDICO_102_USI_C ENTRO			11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	
INFANTOMETRO	AC_179 CONSULTORIO_M EDICO_102_USI_C ENTRO	1896	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	AC_179 CONSULTORIO_M EDICO_102_USI_C ENTRO	1876	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
			SEMESTRAL	11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	
DOPPLER FETAL	AC_179 CONSULTORIO_M EDICO_102_USI_C ENTRO	1927	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de voltaje y amperaje del equipo.</li> <li>• Prueba acústica del Transductor.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
			SEMESTRAL	11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	
FONENDOSCOPIO	AC_176 CONSULTORIO_C YD_1_CENTRO	1874	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación acústica.</li> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
			SEMESTRAL	11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_176 CONSULTORIO_C YD_1_CENTRO	1882	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo, martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	

Edna Brigitte Cuya M.  
Ingeniera Biomedica  
F. 25244/570037 CND  
Inval. 01/11/2019-318

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
ESTADIOMETRO	AC_176 CONSULTORIO_C YD_1_CENTRO	1290	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	
INFANTOMETRO	AC_176 CONSULTORIO_C YD_1_CENTRO	1896	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	
BASCULA	AC_176 CONSULTORIO_C YD_1_CENTRO	1284	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	
BASCULA PESA BEBES	AC_176 CONSULTORIO_C YD_1_CENTRO	1914	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	

  
 DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.  
 Ingeniera Biomedica  
 T. 25244 5700 47 CND  
 Invalm 201703-514  
 JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO	AC_176 CONSULTORIO_C YD_1_CENTRO	0220	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biologica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.</li> <li>• Realizar mediciones de verificacion.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	11 AL 15	11	2019	Ingeniera biologica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AC_176 CONSULTORIO_C YD_1_CENTRO	0202	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biologica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.</li> <li>• Realizar mediciones de verificacion.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	11 AL 15	11	2019	Ingeniera biologica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	AC_181 CONSULTORIO_M EDICO_104_USI_C ENTRO	1879	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biologica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
			SEMESTRAL	11 AL 15	11	2019	Ingeniera biologica	
FONENDOSCOPIO	AC_181 CONSULTORIO_M	1873	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biologica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion acustica.</li> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de estado de campana</li> </ul>

Edna Brigitte Coto M.  
Ingeniera Biologica  
I. 25244/570037 GNB  
Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	EDICO_104_USI_C ENTRO		SEMESTRAL	11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_181 CONSULTORIO_M EDICO_104_USI_C ENTRO	1886	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	
BASCULA	AC_181 CONSULTORIO_M EDICO_104_USI_C ENTRO	1904	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	• lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electronicos y mecanicos. • Verificacion de pesos. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento.
			SEMESTRAL	11 AL 15	11	2019		
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	
PESA BEBE	AC_181 CONSULTORIO_M EDICO_104_USI_C ENTRO		SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	• lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos, • revisión de componentes electronicos y mecanicos. • Verificacion de pesos. • Limpieza y desinfeccion. • Prueba de funcionamiento.
			SEMESTRAL	11 AL 15	11	2019		
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	

  
DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cruz M.  
Ingeniera Biomedica  
T.E. 25244/570647 CNP  
Instituto 201703-SIA

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
TENSIOMETRO	AC_181 CONSULTORIO_M EDICO_104_USI_C ENTRO	0218	SEMESTRAL	13 AL 17	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	11 AL 15	11	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	
BASCULA DIGITAL DE PISO	AC_323 CONSULTORIO_C RONICOS PYP	2046	SEMESTRAL	20 AL 24	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	18 AL 22	11	2019		
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	
TALLIMETRO	AC_323 CONSULTORIO_C RONICOS PYP	2045	SEMESTRAL	20 AL 24	05	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				18 AL 22	11	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO ADULTO	AC_323 CONSULTORIO_C RONICOS PYP	2047	SEMESTRAL	20 AL 24	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> </ul>

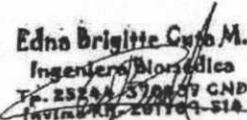
Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
T.C. 25744 / 570697 CND  
Ingeniera 201704-518

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			SEMESTRAL	18 AL 22	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>•Verificacion de pesos.</li> <li>•Limpieza y desinfeccion.</li> <li>•Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
FONENDOSCOPIO	AC_323 CONSULTORIO_C RONICOS PYP	2048	SEMESTRAL	20 AL 24	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificacion acustica.</li> <li>•Verificacion fisica del equipo.</li> <li>•Verificacion de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> </ul>
			SEMESTRAL	18 AL 22	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>•Prueba de funcionamiento</li> </ul>
BASCULA PESA BEBES	AC_240 CONSULTORIO_V ACUNACION_204_ PYP	0517	SEMESTRAL	20 AL 24	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>•verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> </ul>
			SEMESTRAL	18 AL 22	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>•Verificacion de pesos.</li> <li>•Limpieza y desinfeccion.</li> <li>•Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA DIGITAL DE PISO	AC_327 CONSULTORIO_R OSA_CENTRO	1913	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>•verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> </ul>
			SEMESTRAL	26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>•Verificacion de pesos.</li> <li>•Limpieza y desinfeccion.</li> <li>•Prueba de funcionamiento.</li> </ul>

  
DIRECTOR/GERENTE

  
Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
C.R. 23244 / 370007 CND  
FARMACIA 201704-314

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS	AC_ 327 CONSULTORIO_R OSA_CENTRO	0706	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
			SEMESTRAL	26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	
TALLIMETRO	AC_ 327 CONSULTORIO_R OSA_CENTRO	1895	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
			SEMESTRAL	26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	
LAMPARA CUELLO DE CISNE	AC_ 327 CONSULTORIO_R OSA_CENTRO	1964	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Limpieza externa e interna del equipo.</li> <li>• prueba de impedancia y voltajes.</li> <li>• Verificar intensidad luminica.</li> <li>• prueba de funcionamiento con el operador</li> </ul>
			SEMESTRAL	26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO	AC_ 327 CONSULTORIO_R OSA_CENTRO	0275	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
R. 25244 570007 CND  
INSTRUMENTAL 2019-514

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
FONENDOSCOPIO	AC_327 CONSULTORIO_R OSA_CENTRO	1869	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación acústica.</li> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> </ul>
			SEMESTRAL	26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	AC_180 CONSULTORIO_M EDICO_103_USI_C ENTRO	1878	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	
FONENDOSCOPIO	AC_180 CONSULTORIO_M EDICO_103_USI_C ENTRO	1871	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación acústica.</li> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_180 CONSULTORIO_M EDICO_103_USI_C ENTRO	1885	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	
ESTADIOMETRO	AC_180 CONSULTORIO_M EDICO_103_USI_C ENTRO	1894	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
T.E. 25244/570047 CND  
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
INFANTOMETRO	AC_180 CONSULTORIO_M EDICO_103_USI_C ENTRO	1896	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO	AC_180 CONSULTORIO_M EDICO_103_USI_C ENTRO	0274	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> </ul>
			SEMESTRAL	26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AC_180 CONSULTORIO_M EDICO_103_USI_C ENTRO	1868	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> </ul>
			SEMESTRAL	26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA	AC_180 CONSULTORIO_M	1906	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> </ul>

Edna Brigitte Cely M.  
Ingeniera Biomedica  
T.P. 25244 570037 CND  
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades		
				DD	MM	AA				
	EDICO_103_USI_C ENTRO		SEMESTRAL	26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>Verificacion de pesos.</li> <li>Limpieza y desinfeccion.</li> <li>Prueba de funcionamiento.</li> </ul>		
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.		
BASCULA PESA BEBE	AC_180 CONSULTORIO_M EDICO_103_USI_C ENTRO	0353	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>lubricación de partes mecánicas.</li> <li>verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> </ul>		
			SEMESTRAL	26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>Verificacion de pesos.</li> <li>Limpieza y desinfeccion.</li> <li>Prueba de funcionamiento.</li> </ul>		
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.		
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	AC_180 CONSULTORIO_M EDICO_103_USI_C ENTRO	1876	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.		
				26 AL 29			11		2019	Ingeniera biomedica
FONENDOSCOPIO	AC_181 CONSULTORIO_M EDICO_104_USI_C ENTRO	1870	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificacion acustica.</li> <li>Verificacion fisica del equipo.</li> <li>Verificacion de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>Limpieza del equipo.</li> <li>Prueba de funcionamiento</li> </ul>		
				26 AL 29			11		2019	Ingeniera biomedica



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
C.R. 25244 / 570047 CND  
Inventado 201904-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_180 CONSULTORIO_M EDICO_103_USI_C ENTRO	1887	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	
ESTADIOMETRO	AC_180 CONSULTORIO_M EDICO_103_USI_C ENTRO	1893	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	
INFANTOMETRO	AC_180 CONSULTORIO_M EDICO_103_USI_C ENTRO	1896	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO	AC_180 CONSULTORIO_M EDICO_103_USI_C ENTRO	0293	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	
BASCULA	AC_180 CONSULTORIO_M	1909	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> </ul>

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	EDICO_103_USI_C ENTRO		SEMESTRAL	26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBE	AC_180 CONSULTORIO_M EDICO_103_USI_C ENTRO	1915	SEMESTRAL	27 AL 31	05	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	26 AL 29	11	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBES	AC_135 ENFERMERIA_UNI DAD_MOVIL_2	0052	SEMESTRAL	08 AL 12	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	14 AL 18	09	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cuss M.  
Ingeniera Biomedica  
C.P. 25204-5700-07 CND  
Inventariada 2019-518

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
BASCULA DIGITAL DE PISO	AC_135 ENFERMERIA_UNI DAD_MOVIL_3	1286	SEMESTRAL	08	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				AL				
				12				
				14				
				AL				
				18				
				22 al				
				30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS	AC_135 ENFERMERIA_UNI DAD_MOVIL_5	0080	SEMESTRAL	08	04	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				AL				
				14				
				AL				
				18				
EQUIPO DE ORGANOS MARCA WELCH ALLYN	AC_135 ENFERMERIA_UNI DAD_MOVIL_6	0046	SEMESTRAL	08	04	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				AL				
				14				
				AL				
				18				
FONENDOSCOPIO	AC_135 ENFERMERIA_UNI DAD_MOVIL_8	0078	SEMESTRAL	08	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación acústica.</li> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				AL				
				14				
				AL				
				18				
FONENDOSCOPIO	AC_135 ENFERMERIA_UNI DAD_MOVIL_9	0045	SEMESTRAL	08	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación acústica.</li> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de estado de campana</li> </ul>
				AL				
				12				

Edna Brigitte Coto M.  
Ingeniera Biomedica  
C.P. 25242 / 570007 CNP  
Inventario 2019-01 SIA

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			SEMESTRAL	14 AL 18	09	2019	Ingeniera biomedica	de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
DOPLER FETAL	AC_135 ENFERMERIA_UNI DAD_MOVIL_10	0043	SEMESTRAL	08 AL 12	04	2019	Ingeniera biomedica	• Verificación física del equipo. • Verificación de voltaje y amperaje del equipo.
			SEMESTRAL	14 AL 18	09	2019	Ingeniera biomedica	• Prueba acústica del Transductor. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento
PULSOXIMETRO	AC_135 ENFERMERIA_UNI DAD_MOVIL_11	0049	SEMESTRAL	08 AL 12	04	2019	Ingeniera biomedica	• lubricación de partes mecánicas. • verificación de voltaje en equipos electrónicos, • revisión de componentes electrónicos y mecánicos.
			SEMESTRAL	14 AL 18	09	2019	Ingeniera biomedica	• Verificación de pesos. • Limpieza y desinfección. • Prueba de funcionamiento.
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO	AC_135 ENFERMERIA_UNI DAD_MOVIL_12	0211	SEMESTRAL	08 AL 12	04	2019	Ingeniera biomedica	• Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.
			SEMESTRAL	14 AL 18	09	2019	Ingeniera biomedica	• Realizar mediciones de verificación. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO	AC_135 ENFERMERIA_UNI DAD_MOVIL_13	0212	SEMESTRAL	08 AL 12	04	2019	Ingeniera biomedica	• Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.

  
DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
C. 25244/59 AN 07 CND  
Inventario 2019a-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

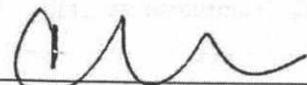
Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			SEMESTRAL	14 AL 18	09	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Relizar mediciones de verificacion.</li> <li>•Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA DE PISO	AC_135 ENFERMERIA_UNI DAD_MOVIL_14	0332	SEMESTRAL	08 AL 12	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>•verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>•revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> </ul>
			SEMESTRAL	14 AL 18	09	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificacion de pesos.</li> <li>•Limpieza y desinfeccion.</li> <li>•Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TALLIMETRO	AC_135 ENFERMERIA_UNI DAD_MOVIL_15	1094	SEMESTRAL	08 AL 12	04	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				14 AL 18	09	2019	Ingeniera biomedica	
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_131 ODONTOLOGIA_U NIDAD_MOVIL 1	0584	SEMESTRAL	08 AL 12	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificacion fisica del equipo.</li> <li>•Verificacion de intensidad luminica.</li> <li>•Prueba de volatje y amperaje.</li> </ul>
				14 AL 18	09	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificacion de componentes electronicas.</li> <li>•Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>•Prueba de funcionamiento.</li> </ul>

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cely M.  
Ingeniera Biomedica  
C.C. 25204370007 CND  
INSTRUMENTAL 2019-214

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_131 ODONTOLOGIA_U NIDAD_MOVIL 2	0081	SEMESTRAL	08 AL 12	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de intensidad luminica.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Verificación de componentes electronicas.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				14 AL 18	09	2019	Ingeniera biomedica	
MICROMOTOR	AC_131 ODONTOLOGIA_U NIDAD_MOVIL 3	0058	SEMESTRAL	08 AL 12	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				14 AL 18	09	2019	Ingeniera biomedica	
MICROMOTOR	AC_131 ODONTOLOGIA_U NIDAD_MOVIL 4	0059	SEMESTRAL	08 AL 12	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				14 AL 18	09	2019	Ingeniera biomedica	
PIEZA DE MANO	AC_131 ODONTOLOGIA_U NIDAD_MOVIL 5	1170	SEMESTRAL	08 AL 12	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				14 AL 18	09	2019	Ingeniera biomedica	
PIEZA DE ALTA	AC_131 ODONTOLOGIA_U NIDAD_MOVIL 6	0060	SEMESTRAL	08 AL 12	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				14 AL 18	09	2019	Ingeniera biomedica	
UNIDAD ODONTOLOGICA	AC_131 ODONTOLOGIA_U NIDAD_MOVIL 7	0075	SEMESTRAL	08 AL 12	04	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar voltaje y amperaje.</li> <li>• intensidades de lámpara.</li> <li>• verificar funcionamiento de válvulas.</li> </ul>

  
DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
C.C. 25244 / 590007 CND  
Ingenieria - 201704 - 512

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				14 AL 18	09	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verificar succión y desagües.</li> <li>• verificar sistema de regulación</li> <li>• lubricación de partes móviles.</li> <li>• Limpieza de filtros de succión.</li> <li>• verificar componentes electronicos y tablero de control.</li> <li>• Verificación de fugas.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
MONITOR DE SIGNOS VITALES	AC_260 AMBULANCIA_NI SSAN	0085	SEMESTRAL	10 AL 14	06	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Prueba de fugas.</li> <li>• Prueba de saturación.</li> <li>• Prueba de visualización de ondas.</li> <li>• Verificación de alarmas.</li> <li>• Verificación de funcionamiento de batería.</li> <li>• Verificación de voltaje y de amperaje.</li> <li>• Verificación de componentes electronicos.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				02 AL 06	12	2019	Empresa contratada de calibracion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de voltaje y de amperaje.</li> <li>• Verificación de componentes electronicos.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO	AC_260 AMBULANCIA_NI SSAN	0086	SEMESTRAL	10 AL 14	06	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de voltaje y amperaje.</li> <li>• Verificación de funcionamiento de compresor.</li> <li>• Verificación de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>• Cambio de filtro.</li> <li>• Limpieza interna y externa del</li> </ul>
				02 AL 06	12	2019	Ingeniera biomedica	

Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
C. 25244372007 CNP  
Ingeniera 2017-2019-2020

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								equipo. •Prueba de funcionamiento.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AC_260 AMBULANCIA_NI SSAN	0201	SEMESTRAL	10 AL 14	06	2019	Ingeniera biomedica	•Verificar fugas . •Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazalete.
			SEMESTRAL	02 AL 06	12	2019	Ingeniera biomedica	•Relizar mediciones de verificacion. •Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
TENSIOMETRO	AC_260 AMBULANCIA_NI SSAN	0214	SEMESTRAL	10 AL 14	06	2019	Ingeniera biomedica	•Verificar fugas . •Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazalete.
			SEMESTRAL	02 AL 06	12	2019	Ingeniera biomedica	•Relizar mediciones de verificacion. •Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
FONENDOSCOPIO	AC_260 AMBULANCIA_NI SSAN	0354	SEMESTRAL	10 AL 14	06	2019	Ingeniera biomedica	•Verificacion acustica. •Verificacion fisica del equipo. •Verificacion de estado de campana de alta y baja frecuencia.
				02 AL 06	12	2019	Ingeniera biomedica	• Limpieza del equipo. •Prueba de funcionamiento
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	AC_260 AMBULANCIA_NI SSAN	0400	SEMESTRAL	10 AL 14	06	2019	Ingeniera biomedica	•Verificacion acustica. •Verificacion fisica del equipo. •Verificacion de estado de campana de alta y baja frecuencia.
				02 AL 06	12	2019	Ingeniera biomedica	• Limpieza del equipo. •Prueba de funcionamiento



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cruz M.  
Ingeniera Biomedica  
C.R. 25244-5700-07 CND  
Ingeniera Biomedica - 201909-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

## PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE - Monquirá

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 4 de Enero de 2019

Vigencia 2019

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. \$ 75.111.290

NOMBRE DEL EQUIPO	LOCALIZACION	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	DD	MM	AA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES
BASCULA PESA BEBES	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	0966	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomédica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> </ul>
			SEMESTRAL	20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomédica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	0965	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomédica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomédica	
DOPLER FETAL	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	0408	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomédica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de voltaje y amperaje del equipo.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomédica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba acústica del Transductor.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomédica  
T. 25242570007 GND  
Instituto 201704-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades		
				DD	MM	AA				
TALLIMETRO	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	1291	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.		
				20 AL 23			08		2019	Ingeniera biomedica
INFANTOMETRO DE MADERA	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	0044	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.		
				20 AL 23			08		2019	Ingeniera biomedica
TENSIOMETRO	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	0306	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.</li> <li>• Relizar mediciones de verificacion.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>		
			SEMESTRAL	20 AL 23			08		2019	Ingeniera biomedica
			ANUAL	22 al 30			04		2019	Empresa contratada de calibracion
BASCULA DE PISO	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	0333	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>• Verificacion de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>		
			SEMESTRAL	20 AL 23			08		2019	Ingeniera biomedica
			ANUAL	22 al 30			04		2019	Empresa contratada de calibracion



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
T.P. 25504/570007 CND  
INVIABR/201903-518

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
FONENDOSCOPIO	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	0369	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación acústica.</li> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	0813	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
BASCULA PESA BEBES	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	0977	SEMESTRAL	25 AL 28	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	26 al 30	08	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	
BASCULA DE PISO	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	0968	SEMESTRAL	25 AL 28	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	26 al 30	08	2019	Ingeniera biomedica	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
C. 25244/37007 CND  
INVIEMBRE 2019-214

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
EQUIPO DE ORGANOS	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	0973	SEMESTRAL	25 AL 28	02	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				26 al 30	08	2019	Ingeniera biomedica	
FONENDOSCOPIO	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	0972	SEMESTRAL	25 AL 28	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion acustica.</li> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				26 al 30	08	2019	Ingeniera biomedica	
DOPLER FETAL	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	0923	SEMESTRAL	25 AL 28	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de voltaje y amperaje del equipo.</li> <li>• Prueba acustica del Transductor.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				26 al 30	08	2019	Ingeniera biomedica	
INFANTOMETRO DE MADERA	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	0045	SEMESTRAL	25 AL 28	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				26 al 30	08	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	0235	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometo y brazaletes.</li> <li>• Relizar mediciones de verificacion.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	

Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
C. 25264-57007-021  
INVIAMUN-201709-SIA

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	0820	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
TALLIMETRO	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	1116	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
BASCULA PESA BEBES	AC_166 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MON QUIRA	0988	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>•verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>•revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>•Verificacion de pesos.</li> <li>•Limpieza y desinfeccion.</li> <li>•Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	
EQUIPO DE ORGANOS MARCA WELCH ALLYN	AC_166 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MON QUIRA	0985	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				02				
				AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	



DIRECTOR/GERE

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
C. 25200 3700 47 CND  
Inventario 2019-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
FONENDOSCOPIO	AC_166 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MON QUIRA	0982	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera,biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificacion acustica.</li> <li>•Verificación física del equipo.</li> <li>•Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>•Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				02 AI 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
LAMPARA CUELLO DE CISNE	AC_166 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MON QUIRA	0983	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>•Limpieza externa e interna del equipo.</li> <li>• prueba de impedancia y voltajes.</li> <li>• Verificar intensidad luminica.</li> <li>• prueba de funcionamiento con el operador</li> </ul>
				02 AI 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
INFANTOMETRO DE MADERA	AC_166 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MON QUIRA	0040	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				02 AI 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO	AC_166 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MON QUIRA	0246	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometo y brazaletes.</li> <li>•Relizar mediciones de verificacion.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	02 AI 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_166 CONSULTORIO_E	0815	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
I.P. 25544/59/2007 CND  
INVIAMAT 201109-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	NFERMERIA_MON QUIRA			02 Al 06	09	2019	Ingeniera biomedica	martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
TALLIMETRO	AC_166 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MON QUIRA	1117	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				02 Al 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
UNIDAD ODONTOLOGICA SILLON ELECTRICO	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	0753	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar voltaje y amperaje.</li> <li>• intensidades de lámpara.</li> <li>• verificar funcionamiento de válvulas.</li> <li>• verificar succión y desagües.</li> <li>• verificar sistema de regulación</li> <li>• lubricacion de partes moviles.</li> <li>• Limpieza de filtros de succion.</li> <li>• verificar componentes electronicos y tablero de control.</li> <li>• Verificacion de fugas.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				02 Al 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	1270	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de intensidad luminica.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Verificacion de componentes electronicas.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 Al 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	1972	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de intensidad luminica.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Verificacion de componentes electronicas.</li> <li>• Limpieza interna y externa del</li> </ul>
				02 Al 06	09	2019	Ingeniera biomedica	



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
T.P. 25200 5700 47 CND  
INSTRUMENTAL 2017/04 553

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								equipo. •Prueba de funcionamiento.
AMALGAMADOR	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	1008	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	Verificar voltaje de entrada, verificar funcionamiento panel frontal, revisión porta amalgama, revisión selector de velocidad, revisar partes roscadas, revisar funcionamiento de motor, verificación correcto funcionamiento, limpieza general.
				02 AI 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
CAVITRONE SCALER ULTRASONICO	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	0756	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	•Verificacion fisica del equipo. •Prueba de voltaje y amperaje. •Limpieza de conductos de presion. •Verificacion de componentes electronicos. •Limpieza interna y externa del equipo. •Prueba de funcionamiento.
				02 AI 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
MICROMOTOR	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	0998	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	•Verificacion de estado fisico. •Lubricacionde partes mecanicas. •verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
				02 AI 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
MICROMOTOR	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	1000	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	•Verificacion de estado fisico. •Lubricacionde partes mecanicas. •verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
				02 AI 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
PIEZA DE MANO	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	1009	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	•Verificacion de estado fisico. •Verificacion de turbina. •Lubricacionde partes mecanicas. •verificacion de eje de micromotor •Prueba de funcionamiento.
				02 AI 06	09	2019	Ingeniera biomedica	

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
Cp. 25000-570007 CND  
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CONTRA ANGULO	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	0999	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
CONTRA ANGULO	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	1001	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
BASCULA DE PISO	AC_171 VACUNACION_MO NQUIRA	0717	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
			SEMESTRAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	
TALLIMETRO	AC_171 VACUNACION_MO NQUIRA	1118	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
			SEMESTRAL	02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
UNIDAD ODONTOLOGICA SILLON ELECTRICO	AC_182 CONSULTORIO_O DONTOLOGI_109_ USI_MONQUI	0743	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar voltaje y amperaje.</li> <li>• intensidades de lámpara.</li> <li>• verificar funcionamiento de válvulas.</li> <li>• verificar succión y desagües.</li> <li>• verificar sistema de regulación</li> <li>• lubricación de partes móviles.</li> </ul>
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	



DIRECTOR/GEREN

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
T. 25244 570677 CND  
INSTRUMENTAL 201503 518

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de filtros de succión.</li> <li>• verificar componentes electrónicos y tablero de control.</li> <li>• Verificación de fugas.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
AMALGAMADOR	AC_182 CONSULTORIO_O DONTOLOGI_109_ USI_MONQUI	0732	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar voltaje de entrada, verificar funcionamiento panel frontal, revisión porta amalgama, revisión selector de velocidad, revisar partes roscadas, revisar funcionamiento de motor, verificación correcto funcionamiento, limpieza general.</li> </ul>
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
CAVITRONE SCALER ULTRASONICO	AC_182 CONSULTORIO_O DONTOLOGI_109_ USI_MONQUI	0744	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Limpieza de conductos de presión.</li> <li>• Verificación de componentes electrónicos.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
MICROMOTOR	AC_182 CONSULTORIO_O DONTOLOGI_109_ USI_MONQUI	0745	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
PIEZA DE MANO	AC_182 CONSULTORIO_O DONTOLOGI_109_ USI_MONQUI	0379	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	

Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
Cp. 25604 570017 CND  
Inviembre 2019-2019-SIA

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PIEZA DE MANO	AC_182 CONSULTORIO_O DONTOLOGI_109_ USI_MONQUI	0747	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
CONTRA ANGULO	AC_182 CONSULTORIO_O DONTOLOGI_109_ USI_MONQUI	0746	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_182 CONSULTORIO_O DONTOLOGI_109_ USI_MONQUI	0904	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de intensidad luminosa.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Verificación de componentes electrónicos.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
BASCUA PESA BEBES	AC_185 CONSULTA_PRIOR ITARIA_MONQUI RA	0718	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	
EQUIPO DE ORGANOS	AC_185 CONSULTA_PRIOR	0716	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	ITARIA_MONQUIRA		SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
INFANTOMETRO DE MADERA	AC_185 CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0032	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO	AC_185 CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0243	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.</li> <li>• Relizar mediciones de verificacion.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	
BASCULA DE PISO	AC_185 CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0335	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>• Verificacion de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	
FONENDOSCOPIO	AC_185 CONSULTA_PRIOR	0357	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion acustica.</li> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de estado de campana</li> </ul>

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
Cp. 25200570007 CND  
Inventario 2019-2020-2021

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	ITARIA_MONQUIRA			09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_185 CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0808	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				09 AL 13			Ingeniera biomedica	
TALLÍMETRO	AC_185 CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	1107	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				09 AL 13			Ingeniera biomedica	

## PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE - Magdalena

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 4 de Enero de 2019

Vigencia 2019

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. \$ 75.111.290

NOMBRE DEL EQUIPO	LOCALIZACION	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	DD	MM	AA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES
BASCULA PESA BEBES	AC_151 CONSULTORIO_M EDICO_101_MAGD ALENA	0900	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>• Verificacion de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
				22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	
EQUIPO DE ORGANOS	AC_151 CONSULTORIO_M EDICO_101_MAGD ALENA	0387	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
PULSOXIMETRO PORTATIL	AC_151 CONSULTORIO_M EDICO_101_MAGD ALENA	1230	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de sensores receptor y emisor. • Verificacion de voltaje y amperaje.</li> <li>• Verificacionde baterias.</li> <li>• Limpieza externa e intierna del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	



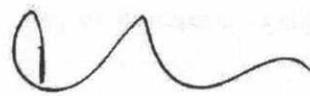
DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cely M.  
Ingeniera Biomedica  
C. 25244570007 GND  
Instituto de Medicina - 201704-214

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración -	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
INFANTOMETRO DE MADERA	AC_151 CONSULTORIO_M EDICO_101_MAGD ALENA	0041	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO	AC_151 CONSULTORIO_M EDICO_101_MAGD ALENA	0272	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometo y brazalete.</li> <li>• Relizar mediciones de verificacion.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
				22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA DE PISO	AC_151 CONSULTORIO_M EDICO_101_MAGD ALENA	0326	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electronicos y mecánicos.</li> <li>• Verificacion de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
				22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
FONENDOSCOPIO	AC_151 CONSULTORIO_M	0365	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion acustica.</li> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> </ul>

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	EDICO_101_MAGD ALENA			12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
GLUCOMETRO	AC_151 CONSULTORIO_M EDICO_101_MAGD ALENA	S/P	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	Verificación de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento, limpieza general.
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_151 CONSULTORIO_M EDICO_101_MAGD ALENA	0810	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
TALLIMETRO	AC_151 CONSULTORIO_M EDICO_101_MAGD ALENA	1112	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
BASCULA PESA BEBES	AC_152 CONSULTORIO_M EDICO_102_MAGD ALENA	0910	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
				22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	
BASCULA DE PISO	AC_152 CONSULTORIO_M	0928	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en</li> </ul>

  
DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Coto M.  
Ingeniera Biomedica  
T.P. 25244578037 CND  
Ingeniera 201709-514

IEFF DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	EDICO_102_MAGD -ALENA			12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	equipos electrónicos, •revisión de componentes electrónicos y mecánicos. •Verificación de pesos. •Limpieza y desinfección. •Prueba de funcionamiento.
				22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS	AC_152 CONSULTORIO_M EDICO_102_MAGD ALENA	0909	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
INFANTOMETRO DE MADERA	AC_152 CONSULTORIO_M EDICO_102_MAGD ALENA	0043	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO	AC_152 CONSULTORIO_M EDICO_102_MAGD ALENA	0263	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	• Verificar fugas . • Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes. • Realizar mediciones de verificación. • Limpieza del equipo • prueba de funcionamiento.
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
				22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	
FONENDOSCOPIO	AC_152 CONSULTORIO_M	0383	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	• Verificación acústica. • Verificación física del equipo.

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cuya M.  
Ingeniera Biomedica  
T.P. 25648/590037 CND  
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica - SISA

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	EDICO_102_MAGD ALENA			12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_152 CONSULTORIO_M EDICO_102_MAGD ALENA	0812	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
TALLIMETRO	AC_152 CONSULTORIO_M EDICO_102_MAGD ALENA	1113	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
UNIDAD ODONTOLOGICA SILLON ELECTRICO	AC_153 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_105 _MAGDALENA	0883	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar voltaje y amperaje. intensidades de lámpara.</li> <li>• verificar funcionamiento de válvulas.</li> <li>• verificar succión y desagües.</li> <li>• verificar sistema de regulación</li> <li>• lubricacion de partes moviles.</li> <li>• Limpieza de filtros de succion.</li> <li>• verificar componentes electronicos y tablero de control.</li> <li>• Verificación de fugas.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_153 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_105 _MAGDALENA	1124	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de intensidad luminica.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Verificación de componentes electronicas.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	



DIRECTOR/GERENTE

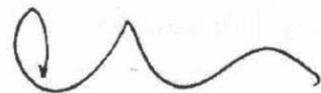
Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
T. 2524457867 CND  
Inscripción 201703-518

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
AMALGAMADOR	AC_153 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_105 _MAGDALENA	0887	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	Verificar voltaje de entrada, verificar funcionamiento panel frontal, revisión porta amalgama, revisión selector de velocidad, revisar partes roscadas, revisar funcionamiento de motor, verificación correcto funcionamiento, limpieza general.
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
INSERTO CAVITRON 25K-TFI-10	AC_153 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_105 _MAGDALENA	1299	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Limpieza de conductos de presión.</li> <li>• Verificación de componentes electrónicos.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
CAVITRONE SCALER ULTRASONICO	AC_153 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_105 _MAGDALENA	0889	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Limpieza de conductos de presión.</li> <li>• Verificación de componentes electrónicos.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
MICROMOTOR	AC_153 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_105 _MAGDALENA	1121	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
MICROMOTOR	AC_153 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_105 _MAGDALENA	1302	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
PIEZA DE MANO	AC_153 CONSULTORIO_O	0884	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Verificación de turbina.</li> </ul>

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
C.R. 25844 57407 CNP  
MOTIVADA 2019-09-31A

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	DONTOLOGIA_105 _MAGDALENA			12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Lubricacionde partes mecanicas.</li> <li>•verificación de eje de micromotor</li> <li>•Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
PIEZA DE MANO	AC_153 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_105 _MAGDALENA	0888	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificacion de estado fisico.</li> <li>•Verificacion de turbina.</li> </ul>
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Lubricacionde partes mecanicas.</li> <li>•verificación de eje de micromotor</li> <li>•Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
CONTRA ANGULO	AC_153 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_105 _MAGDALENA	1295	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificacion de estado fisico.</li> <li>•Verificacion de turbina.</li> </ul>
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Lubricacionde partes mecanicas.</li> <li>•verificación de eje de micromotor</li> <li>•Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
CONTRA ANGULO	AC_153 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_105 _MAGDALENA	1122	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificacion de estado fisico.</li> <li>•Lubricacionde partes mecanicas.</li> </ul>
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•verificación de eje de micromotor</li> <li>•Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
EQUIPO DE RX PERIAPICAL MURO	AC_153 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_105 _MAGDALENA	0764	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•De acuerdo a protocolo de proveedor de mantenimiento.</li> </ul>
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
NEGATOSCOPIO	AC_153 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_105 _MAGDALENA	0910	SEMESTRAL	11 al 15	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificar voltaje y amperaje, intensidad de la luz, contactos electricos</li> </ul>
				12 AL 16	08	2019	Ingeniera biomedica	
UNIDAD ODONTOLOGICA COMPLETA	AC_154 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_106 _MAGDALENA	0870	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verificar voltaje y amperaje.</li> <li>• intensidades de lámpara.</li> <li>•verificar funcionamiento de válvulas.</li> <li>•verificar succión y desagües.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verificar sistema de regulación</li> <li>• lubricacion de partes moviles.</li> <li>•Limpieza de filtros de succion.</li> </ul>



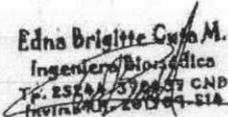
DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Coto M.  
Ingeniera Biomedica  
C.P. 25244-570007 CND  
Ingeniera 2017-514

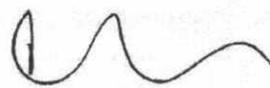
JEFE DE MANTENIMIENTO

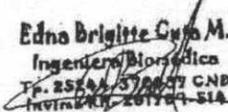
Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• verificar componentes electronicos y tablero de control.</li> <li>• Verificación de fugas.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_154 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_106 _MAGDALENA	0404	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion deintensidad luminica.</li> <li>• Prueba de volatje y amperaje.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion de componentes electronicas.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
AMALGAMADOR	AC_154 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_106 _MAGDALENA	0762	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Verificar voltaje de entrada, verificar funcionamiento panel frontal, revisión porta amalgama, revisión selector de velocidad, revisar partes roscadas, revisar funcionamiento de motor, verificación correcto funcionamiento, limpieza general.
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
CAVITRONE SCALER ULTRASONICO	AC_154 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_106 _MAGDALENA	0872	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Limpieza de conductos de presion.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion de componentes electronicos.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
MICROMOTOR	AC_154 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_106 _MAGDALENA	0874	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion de estado fisico.</li> <li>• Lubricacionde partes mecanicas.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verificacion de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>

  
DIRECTOR/GERENTE

  
Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
T.P. 25644 578647 CND  
Inventario 2019-2019-SIA  
JEFE DE MANTENIMIENTO

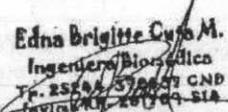
Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
MICROMOTOR	AC_154 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_106 _MAGDALENA	0876	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
PIEZA DE MANO	AC_154 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_106 _MAGDALENA	0873	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
PIEZA DE MANO	AC_154 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_106 _MAGDALENA	0878	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
CONTRA ANGULO	AC_154 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_106 _MAGDALENA	0875	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
CONTRA ANGULO	AC_154 CONSULTORIO_O DONTOLOGIA_106 _MAGDALENA	0877	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
BASCULA PESA BEBES	AC_155 CONSULTORIO_C YD_MAGDALENA	0926	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> </ul>

  
 DIRECTOR/GERENTE

  
 Edna Brigitte Cuyo M.  
 Ingeniera Biomedica  
 T.F. 25504 510047 CND  
 INVENTARIO 2017-2018 SIA  
 JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA DIGITAL DE PISO	AC_155 CONSULTORIO_C YD_MAGDALENA	1288	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
EQUIPO DE ORGANOS	AC_155 CONSULTORIO_C YD_MAGDALENA	0924	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
FONENDOSCOPIO	AC_155 CONSULTORIO_C YD_MAGDALENA	0925	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion acustica.</li> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>

  
DIRECTOR/GERENTE

  
Edna Brigitte Cury M.  
Ingeniera Biomedica  
C.R. 25246 / 57007 CND  
Invalidez 2013-2014-SIA

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
DOPLER FETAL	AC_155 CONSULTORIO_C YD_MAGDALENA	0077	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de voltaje y amperaje del equipo.</li> <li>• Prueba acústica del Transductor.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
INFANTOMETRO DE MADERA	AC_155 CONSULTORIO_C YD_MAGDALENA	0042	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
LAMPARA CUELLO DE CISNE	AC_155 CONSULTORIO_C YD_MAGDALENA	0103	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Limpieza externa e interna del equipo.</li> <li>• prueba de impedancia y voltajes.</li> <li>• Verificar intensidad luminica.</li> <li>• prueba de funcionamiento con el operador</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AC_155 CONSULTORIO_C YD_MAGDALENA	0205	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.</li> <li>• Realizar mediciones de verificación.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
				22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
TENSIOMETRO	AC_155 CONSULTORIO_C YD_MAGDALENA	0280	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.</li> <li>• Realizar mediciones de verificacion.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
				22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_155 CONSULTORIO_C YD_MAGDALENA	0811	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
TALLIMETRO	AC_155 CONSULTORIO_C YD_MAGDALENA	1114	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
BASCULA DE PISO	AC_156 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MAG DALENA	0976	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>• Verificacion de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
				22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.



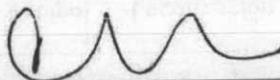
DIRECTOR/GERENTE

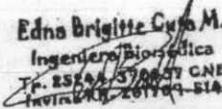
Edna Brigitte Cuya M.  
Ingeniera Biomedica  
Tf. 25224570007 CND  
Inscripción 201709-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
EQUIPO DE ORGANOS	AC_156 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MAG DALENA	0417	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
FONENDOSCOPIO	AC_156 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MAG DALENA	1205	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación acústica.</li> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
TALLIMETRO	AC_156 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MAG DALENA	1292	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
INFANTOMETRO	AC_156 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MAG DALENA	0055	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO	AC_156 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MAG DALENA	0271	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazalete.</li> <li>• Realizar mediciones de verificación.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
				22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
TENSIOMETRO	AC_156 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MAG DALENA	0297	SEMESTRAL	18	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de, pera, valvula de alivio, manometro y brazalete.</li> <li>• Relizar mediciones de verificacion.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				AL				
				22	08	2019	Ingeniera biomedica	
20								
				23				
				22 al	04	2019	Empresa contratada de calibracion	
				30				
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_156 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MAG DALENA	0819	SEMESTRAL	18	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpia con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				AL				
				20	08	2019	Ingeniera biomedica	
				AL				
				23				

  
DIRECTOR/GERENTE

  
Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
T. 25544-57007 CND  
Instituto 201109-514  
JEFE DE MANTENIMIENTO

## PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE - Monquirá

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

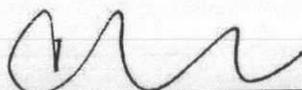
Fecha de Elaboración 4 de Enero de 2019

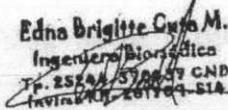
Vigencia 2019

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. \$ 75.111.290

NOMBRE DEL EQUIPO	LOCALIZACION	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	DD	MM	AA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES
BASCULA PESA BEBES	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	0966	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> </ul>
			SEMESTRAL	20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	0965	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
DOPLER FETAL	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	0408	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de voltaje y amperaje del equipo.</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba acústica del Transductor.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
TALLIMETRO	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	1291	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
INFANTOMETRO DE MADERA	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	0044	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	0306	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometo y brazaete.</li> <li>• Relizar mediciones de verificacion.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	
BASCULA DE PISO	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	0333	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>• Verificacion de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	

  
DIRECTOR/GERENTE

  
Edna Brigitte Guzmán M.  
Ingeniera Biomedica  
T. 25244 5700 97 CND  
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
FONENDOSCOPIO	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	0369	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación acústica.</li> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_163 CONSULTORIO_M EDICO_102_MON QUIRA	0813	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.</li> <li>• martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante</li> </ul>
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
BASCULA PESA BEBES	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	0977	SEMESTRAL	25 AL 28	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	26 al 30	08	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	
BASCULA DE PISO	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	0968	SEMESTRAL	25 AL 28	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	26 al 30	08	2019	Ingeniera biomedica	

DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
T. 23644 57867 GND  
Inventario 2019-2020

JEFE DE MANTENIMIENTO

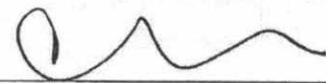
Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
EQUIPO DE ORGANOS	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	0973	SEMESTRAL	25 AL 28	02	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				26 al 30	08	2019	Ingeniera biomedica	
FONENDOSCOPIO	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	0972	SEMESTRAL	25 AL 28	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion acustica.</li> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				26 al 30	08	2019	Ingeniera biomedica	
DOPLER FETAL	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	0923	SEMESTRAL	25 AL 28	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de voltaje y amperaje del equipo.</li> <li>• Prueba acustica del Transductor.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				26 al 30	08	2019	Ingeniera biomedica	
INFANTOMETRO DE MADERA	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	0045	SEMESTRAL	25 AL 28	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				26 al 30	08	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	0235	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas .</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaletes.</li> <li>• Relizar mediciones de verificacion.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	

  
DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cely M.  
Ingeniera Biomedica  
C.R. 25244 / 370007 CNB  
Firma 2019-04-21

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
.	.	.	ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	0820	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
TALLIMETRO	AC_164 CONSULTORIO_M EDICO_101_MONQ UIRA	1116	SEMESTRAL	18 AL 22	02	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				20 AL 23	08	2019	Ingeniera biomedica	
BASCULA PESA BEBES	AC_166 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MON QUIRA	0988	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>• Verificacion de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	
EQUIPO DE ORGANOS MARCA WELCH ALLYN	AC_166 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MON QUIRA	0985	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
				02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
Tf. 2524 5700 7 CND  
NOVIEMBRE 2019 514

IFFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
FONENDOSCOPIO	AC_166 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MON QUIRA	0982	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación acústica.</li> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Limpieza del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
LAMPARA CUELLO DE CISNE	AC_166 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MON QUIRA	0983	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Limpieza externa e interna del equipo.</li> <li>• prueba de impedancia y voltajes.</li> <li>• Verificar intensidad luminica.</li> <li>• prueba de funcionamiento con el operador</li> </ul>
				02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
INFANTOMETRO DE MADERA	AC_166 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MON QUIRA	0040	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO	AC_166 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MON QUIRA	0246	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas.</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaete.</li> <li>• Realizar mediciones de verificación.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_166 CONSULTORIO_E NFERMERIA_MON QUIRA	0815	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cely M.  
Ingeniera Biomedica  
C. 25244 / 370007 CND  
Inscripción 2017-01-31-518

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
TALLIMETRO	AC_166 CONSULTORIO_E NFARMERIA_MON QUIRA	1117	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
UNIDAD ODONTOLOGICA SILLON ELECTRICO	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	0753	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar voltaje y amperaje.</li> <li>• intensidades de lámpara.</li> <li>• verificar funcionamiento de válvulas.</li> <li>• verificar succión y desagües.</li> <li>• verificar sistema de regulación</li> <li>• lubricacion de partes moviles.</li> <li>• Limpieza de filtros de succion.</li> <li>• verificar componentes electronicos y tablero de control.</li> <li>• Verificacion de fugas.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	1270	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de intensidad luminica.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Verificacion de componentes electronicas.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	1972	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de intensidad luminica.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Verificacion de componentes electronicas.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	



DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
T. 25204570047 CND  
Inventario 2017-2018 SIA

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
AMALGAMADOR	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	1008	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	Verificar voltaje de entrada, verificar funcionamiento panel frontal, revisión porta amalgam, revisión selector de velocidad, revisar partes roscadas, revisar funcionamiento de motor, verificación correcto funcionamiento, limpieza general.
				02 AI 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
CAVITRONE SCALER ULTRASONICO	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	0756	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Limpieza de conductos de presión.</li> <li>• Verificación de componentes electrónicos.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AI 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
MICROMOTOR	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	0998	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AI 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
MICROMOTOR	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	1000	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AI 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
PIEZA DE MANO	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	1009	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AI 06	09	2019	Ingeniera biomedica	

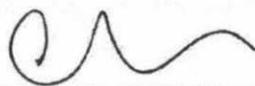


DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Guzmán M.  
Ingeniera Biomedica  
C.P. 25604570007 CND  
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CONTRA ANGULO	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	0999	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
CONTRA ANGULO	AC_167 CONSULTORIO_O DONTOLOGICO_M ONQUIRA	1001	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
BASCULA DE PISO	AC_171 VACUNACION_MO NQUIRA	0717	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
			SEMESTRAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	
TALLIMETRO	AC_171 VACUNACION_MO NQUIRA	1118	SEMESTRAL	03 AL 08	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpieza con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
			SEMESTRAL	02 AL 06	09	2019	Ingeniera biomedica	
UNIDAD ODONTOLOGICA SILLON ELECTRICO	AC_182 CONSULTORIO_O DONTOLOGI_109_ USI_MONQUI	0743	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar voltaje y amperaje.</li> <li>• intensidades de lámpara.</li> <li>• verificar funcionamiento de válvulas.</li> <li>• verificar succión y desagües.</li> <li>• verificar sistema de regulación</li> <li>• lubricación de partes móviles.</li> </ul>
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	

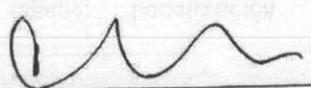


DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
C.P. 25544/570007 CNE  
Inscripción: 201704-514

IEFF DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de filtros de succión.</li> <li>• verificar componentes electrónicos y tablero de control.</li> <li>• Verificación de fugas.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
AMALGAMADOR	AC_182 CONSULTORIO_O DONTOLOGI_109_ USI_MONQUI	0732	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar voltaje de entrada, verificar funcionamiento panel frontal, revisión porta amalgama, revisión selector de velocidad, revisar partes roscadas, revisar funcionamiento de motor, verificación correcto funcionamiento, limpieza general.</li> </ul>
				09 AL 13			Ingeniera biomedica	
CAVITRONE SCALER ULTRASONICO	AC_182 CONSULTORIO_O DONTOLOGI_109_ USI_MONQUI	0744	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Limpieza de conductos de presión.</li> <li>• Verificación de componentes electrónicos.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				09 AL 13			Ingeniera biomedica	
MICROMOTOR	AC_182 CONSULTORIO_O DONTOLOGI_109_ USI_MONQUI	0745	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				09 AL 13			Ingeniera biomedica	
PIEZA DE MANO	AC_182 CONSULTORIO_O DONTOLOGI_109_ USI_MONQUI	0379	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				09 AL 13			Ingeniera biomedica	

  
DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Cuyo M.  
Ingeniera Biomedica  
C.R. 25244 / 372637 CND  
Inventado 2019-01-31

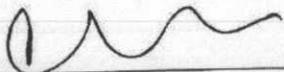
JEFE DE MANTENIMIENTO

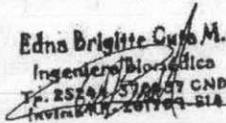
Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PIEZA DE MANO	AC_182 CONSULTORIO_0 DONTOLOGI_109_ USI_MONQUI	0747	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
CONTRA ANGULO	AC_182 CONSULTORIO_0 DONTOLOGI_109_ USI_MONQUI	0746	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_182 CONSULTORIO_0 DONTOLOGI_109_ USI_MONQUI	0904	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Verificación de intensidad luminosa.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Verificación de componentes electrónicos.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
BASCULA PESA BEBES	AC_185 CONSULTA_PRIOR ITARIA_MONQUI RA	0718	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• Verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electrónicos y mecánicos.</li> <li>• Verificación de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfección.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibración	
EQUIPO DE ORGANOS	AC_185 CONSULTA_PRIOR	0716	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	Verificación tensión de entrada o voltaje de baterías, revisión y limpieza de contactos eléctricos, verificar

  
 DIRECTOR/GERENTE

Edna Brigitte Guzmán M.  
 Ingeniera Biomedica  
 T. 25244/370047 CND  
 Inscrita en el 2011 en SIA  
 IEFF DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	ITARIA_MONQUIRA		SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	funcionamiento de las cabezas, revisar regulador de intensidad, limpieza general.
INFANTOMETRO DE MADERA	AC_185 CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0032	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
TENSIOMETRO	AC_185 CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0243	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar fugas.</li> <li>• Verificar estado de pera, valvula de alivio, manometro y brazaete.</li> <li>• Relizar mediciones de verificacion.</li> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
BASCULA DE PISO	AC_185 CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0335	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lubricación de partes mecánicas.</li> <li>• verificación de voltaje de baterías en equipos electrónicos,</li> <li>• revisión de componentes electronicos y mecanicos.</li> <li>• Verificacion de pesos.</li> <li>• Limpieza y desinfeccion.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
			SEMESTRAL	09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
			ANUAL	22 al 30	04	2019	Empresa contratada de calibracion	realizar calibracion del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibracion.
FONENDOSCOPIO	AC_185 CONSULTA_PRIOR	0357	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificacion acustica.</li> <li>• Verificacion fisica del equipo.</li> <li>• Verificacion de estado de campana</li> </ul>

  
DIRECTOR/GERENTE

  
Edna Brigitte Curo M.  
Ingeniera Biomedica  
T. 2524 3700 7 CND  
Inventario 2019-2019-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	ITARIA_MONQUI RA			09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	de alta y baja frecuencia. • Limpieza del equipo. • Prueba de funcionamiento
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_185 CONSULTA_PRIOR ITARIA_MONQUI RA	0808	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. martillo exclusivo para puntos reflejo y estimulante
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	
TALLIMETRO	AC_185 CONSULTA_PRIOR ITARIA_MONQUI RA	1107	SEMESTRAL	11 AL 15	03	2019	Ingeniera biomedica	Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				09 AL 13	09	2019	Ingeniera biomedica	

**PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO**

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE

Dirección CALLE 9 N 11 74

Municipio SOGAMOSO

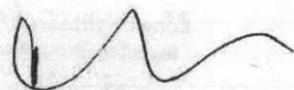
Fecha de Elaboración 2 ENERO 2019

Vigencia 2019

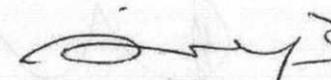
Recursos asignados para el mantenimiento al equipo industrial de uso hospitalario.

\$ 172.200.057

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Compresor odontológico	Ac_consultorio_higiene oral tercer piso	0019	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
				4-8	11	2019		
Compresor odontología	Odontología centro	0424	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
				4-8	11	2019		
Compresor odontología	Ac_consultorio_odontologia_106_magdalena	0871	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor,



DIRECTOR/GERENTE



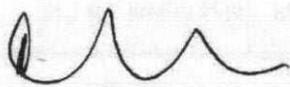
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				4-8	11	2019		verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
Compresor odontología	Ac_consultorio_odontologico_monquirá	1005	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
				4-8	11	2019		
Compresor odontología	Ac_odontologia_unidad_movil_oxn000	0076	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
				4-8	11	2019		
Compresor odontología	Ac_consultorio_odontologico_diamante	1066	Anual	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
Compresor odontología	Ac_consultorio_odontologico_morca	1118	Anual	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y

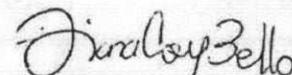
  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
Compresor odontología	Ac_consultorio_odontologia_sucra	0039	Anual	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
Compresor odontología	Ac_consultorio_odontologia_vanegas	1090	Anual	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
Compresor odontología	Ac_consultorio_odontologico_campamento	1146	Anual	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento



DIRECTOR/GERENTE

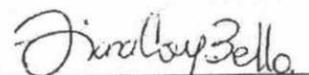


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Compresor odontología	Ac_odontologia_cuarto_piso_pyp	0056	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
				4-8	11	2019		
Compresor odontología	Ac_odontologia_unidad_movil_oxd441	1173	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
				4-8	11	2019		
Compresor odontología	Ac_consultorio_odontologico_pedregal_alt	1196	Anual	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
Motor para unidad portatil	Ac_higiene_oral_3_tercer_piso	0808	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y



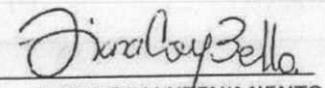
DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				4-8	11	2019		amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
Motor para unidad portátil	Ac_higiene_oral_2_raquel	0803	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
				4-8	11	2019		
Motor para unidad portátil	Ac_higiene_oral_1_rubiela	0799	Cuatrimestral	18-22	3	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
				26-30	8	2019		
				30	11	2019		
Motor para unidad portátil	Ac_higiene_oral_4_stella	0810	Cuatrimestral	18-22	3	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación

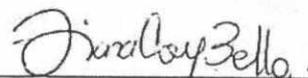
  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				26-30	8	2019		válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalmé, verificación temperatura y prueba de funcionamiento
				30	11	2019		
Ascensor	Edificio pyp	Nd	Mensual	21-25	1	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Revision de todas las partes del elevador, limpieza, lubricación, ajuste con especial énfasis en los elementos de seguridad
				21-25	2	2019		Revision de todas las partes del elevador, limpieza, lubricación, ajuste con especial énfasis en los elementos de seguridad
				21-25	3	2019		Revision de todas las partes del elevador, limpieza, lubricación, ajuste con especial énfasis en los elementos de seguridad
				21-25	4	2019		Revision de todas las partes del elevador, limpieza, lubricación, ajuste con especial énfasis en los elementos de seguridad
				21-25	5	2019		Revision de todas las partes del elevador, limpieza, lubricación, ajuste con especial énfasis en los elementos de seguridad
				21-25	6	2019		Revision de todas las partes del elevador, limpieza, lubricación, ajuste con especial énfasis en los elementos de seguridad
				21-25	7	2019		Revision de todas las partes del elevador, limpieza, lubricación, ajuste con especial énfasis en los elementos de seguridad
				21-25	8	2019		Revision de todas las partes del elevador, limpieza, lubricación, ajuste con especial énfasis en los elementos de seguridad

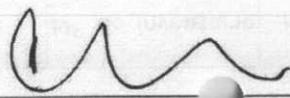


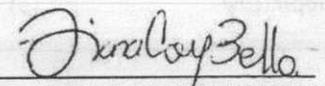
DIRECTOR/GERENTE



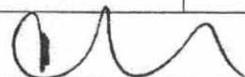
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	recnd			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				21-25	9	2019		Revisión de todas las partes del elevador, limpieza, lubricación, ajuste con especial énfasis en los elementos de seguridad
				21-25	10	2019		Revisión de todas las partes del elevador, limpieza, lubricación, ajuste con especial énfasis en los elementos de seguridad
				21-25	11	2019		Revisión de todas las partes del elevador, limpieza, lubricación, ajuste con especial énfasis en los elementos de seguridad
				21-25	12	2019		Revisión de todas las partes del elevador, limpieza, lubricación, ajuste con especial énfasis en los elementos de seguridad
				24-31	12	2019		Reposición por obsolescencia tecnológica
Congelador	Ac_consultorio_vacunacion_204_pyp	0496	Cuatrimestral	18-22	3	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
				26-30	8	2019		
				30	11	2019		
Destilador de agua	Ac_esterilización_usi_centro	866	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de filtros, limpieza general de equipo y prueba de funcionamiento
				4-8	11	2019		

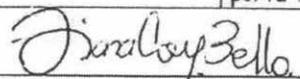
  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Lavadora	Ac_servicios_generales_usi_adm	0300	Anual	6-13	7	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	verificación de filtros, verificación de sistema de llenado, verificación sistema de desagüe, verificación funcionamiento tablero de control, verificación y limpieza de filtro bomba, verificación de control de temperatura si aplica, verificación de voltaje amperaje y frecuencia, verificación de golpes y fugas, verificar velocidad de centrifugado, verificar sistema de arranque, verificar que mangueras y accesorios no presenten grietas, rupturas o estén dobladas, limpieza de filtro de pelusa y motas, prueba de funcionamiento.
Greca	Ac_servicios_generales_usi_adm	295	Anual	4-11	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Limpieza general, cambio de empaques de la llave del grifo para salida de leche, empaques de grifo para la salida de agua, empaques de grifo para la salida de café, cambio de resortes, revisión de pera, tapa, asas del recipiente de la leche, cuerpo-recipiente para agua caliente, porta nivel, bombillo piloto, botón switch, tapa de entrada de agua de la caldera, porta nivel, llave del grifo metálico y soporte de la greca, prueba funcionamiento.
Greca	Ac_servicios_generales_usi_adm	296	Anual	4-11	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Limpieza general, cambio de empaques de la llave del grifo para salida de leche, empaques de grifo para la salida de agua, empaques de grifo para la salida de café, cambio de resortes, revisión de pera, tapa, asas del recipiente de la leche, cuerpo-recipiente para agua caliente, porta nivel, bombillo piloto, botón switch, tapa de entrada de agua de la caldera, porta nivel, llave del grifo metálico y



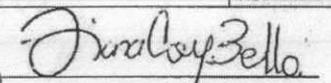
DIRECTOR/GERENTE



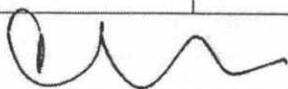
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								soporte de la greca, prueba funcionamiento.
				20-24	5	2019		Cambio de aceite, cambio de filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.
Planta electrica	Ac_mantenimiento_usi_administrativo	0289	Semestral	4-8	11	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite, cambio de filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.
				20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite, cambio de filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.
Planta electrica	Ac_cuarto_de_sistemas_monquirá	1050	Semestral	4-8	11	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite, cambio de filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.

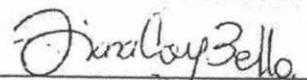
  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.
Planta electrica	Ac_sala_de_energí a_magdalena	1732	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite, cambio de filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.
				4-8	11	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	
Planta electrica	Ac_conductor_unid ad_movil_oxd441	0401	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite, cambio de filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto
				4-8	11	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	



DIRECTOR/GERENTE

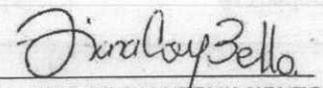


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.
Planta electrica	Ac_conductor_unid ad_movil_oxn000	0402	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite, cambio de filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.
				4-8	11	2019		
Moto - bomba de agua	Auditorio- red emergencia	Nd	Anual	6-13	7	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura, revisión de rodamientos cheques y empaques.



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Moto - bomba de agua	Auditorio- red emergencia	Nd	Anual	6-13	7	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , de acuerdo a las necesidades del equipo, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura, revisión de rodamientos cheques y empaques.
Moto - bomba de agua	Hydro flow	Nd	Cuatrimestral	18-22	3	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura, revisión de rodamientos cheques y empaques. Calibracion presion.
				26-30	8	2019		
				30	11	2019		
Moto - bomba de agua	Hydro flow	Nd	Cuatrimestral	18-22	3	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Cambio de aceite , cambio filtros , verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura, revisión de rodamientos cheques y empaques. Calibración presión.
				26-30	8	2019		
				30	11	2019		

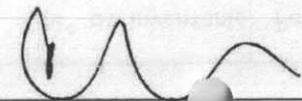


DIRECTOR/GERENTE

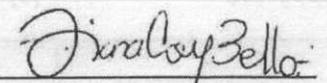


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Nevera	Ac_laboratorio_usi _centro	2019	Anual	6-13	7	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
Nevera	Almacen gral baja adiministrativa ya dep	1955	Anual	6-13	7	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
Nevera	Almacen gral baja adiministrativa ya dep	1954	Anual	6-13	7	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento



DIRECTOR/GERENTE

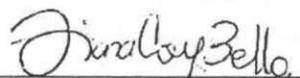


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Nevera	Almacen gral baja adiministrativa ya dep	1956	Anual	6-13	7	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo ( fisuras . y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
Nevera	Almacen gral baja adiministrativa ya dep	1957	Anual	6-13	7	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo ( fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
Nevera 47 litros	Ac_gerencia_usi_ad ministrativo	0245	Anual	6-13	7	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo ( fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento



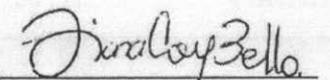
DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

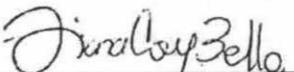
Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Nevera	Ac_laboratorio_usi_centro	0481	Anual	6-13	7	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
Refrigerador	Ac_laboratorio_usi_centro	0634	Anual	6-13	7	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
Refrigerador	Ac_consultorio_vacunacion_204_pyp	0493	Cuatrimestral	18-22	3	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
				26-30	8	2019		
				30	11	2019		

  
DIRECTOR/GERENTE

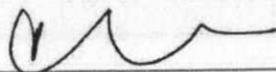
  
IEFF DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Refrigerador	Ac_vacunacion_magdalena	0494	Cuatrimestral	18-22	3	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
				26-30	8	2019		
				30	11	2019		
Refrigerador	Ac_laboratorio_usi_centro	0846	Anual	6-13	7	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
Refrigerador	Ac_consultorio_vacunacion_204_pyp	0942	Cuatrimestral	18-22	3	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
				26-30	8	2019		
				30	11	2019		

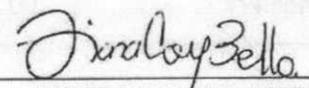
  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	recna			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Refrigerador	Ac_consultorio_vacunacion_204_pyp	0496	Cuatrimestral	18-22	3	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
				26-30	8	2019		
				30	11	2019		
Refrigerador vertical	Ac_laboratorio_usi_centro	1994	Anual	6-13	7	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
Congelador color negro	Ac_consultorio_vacunacion_204_pyp	0492	Cuatrimestral	18-22	3	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
				26-30	8	2019		
				30	11	2019		



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Congelador	Ac_vacunacion_monquira	1040	Cuatrimestral	18-22	3	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	Verificar estado físico del equipo (fisuras y golpes), verificación condensador, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, limpieza de las paredes interiores y exteriores, prueba de funcionamiento
				26-30	8	2019		
				30	11	2019		
Filtro purificador de agua	Ac_servicios_generales_usi_adm	0297	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	limpieza y cambio de filtros
				4-8	11	2019		
Filtro purificador de agua	Ac_servicios_generales_usi_adm	0298	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	limpieza y cambio de filtros
				4-8	11	2019		
Contratista mantenimiento eiuh	Ac_recepcion_pyp	1425	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	limpieza y cambio de filtros
				4-8	11	2019		
Ozonizador	Ac_consultorio_odontologia_106_magdalena	0927	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	limpieza y cambio de filtros
				4-8	11	2019		
Ozonizador	Ac_sala_de_espera_monquira	0992	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	limpieza y cambio de filtros
				4-8	11	2019		
Ozonizador	Ac_consultorio_odontologico_monquira	0997	Semestral	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	limpieza y cambio de filtros
				4-8	11	2019		
Ozonizador	Ac_consultorio_odontologico_morca	1120	Anual	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	limpieza y cambio de filtros

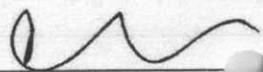


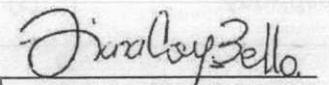
DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Ozonizador	Ac_consultorio_odontologico_campamento	1150	Anual	20-24	5	2019	Contratista Mantenimiento EIUH	limpieza y cambio de filtros
Camioneta Volkswagen Amarok oxn	Sede Centro	1340	CUATRIMESTRAL	13-20	4	2019	Contratista Mantenimiento Vehículos	<p>SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible, cables de alta, 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fueles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO</p>
				13-20	8	2019	Contratista Mantenimiento Vehículos	
				12-19	11	2019	Contratista Mantenimiento Vehículos	

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Camioneta Volkswagen Amarok oxn	Sede Centro	1340	ANUAL	30	3	2019	Contratista : Mantenimiento Vehículos	Revisión Técnico Mecánica
Camioneta Luv DMAX	Sede Centro	1338	Cuatrimestral	23-30	3	2019	Coordinador recursos físicos	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible, cables de alta, 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO
				6-13	8	2019	Coordinador recursos físicos	
				12-19	11	2019	Coordinador recursos físicos	

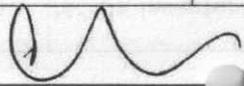


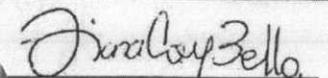
DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Camioneta Luv DMAX	Sede Centro	1338	Anual	19	10	2019	Coordinador recursos físicos	Revisión técnico mecánica y de gases
Unidad Móvil Mercedes Benz	Sede Centro	1337	Anual	16	2	2019	Coordinador recursos físicos	Revisión técnico mecánica y de gases
				4-11	4	2019	Coordinador recursos físicos	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible, cables de alta, 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS: Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO: Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y
Unidad Móvil Mercedes Benz	Sede Centro	1337	Semestral	2-9	11	2019	Coordinador recursos físicos	

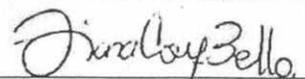
  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								BALANCEO. Mantenimiento General a la carrocería, latonería pintura y tapicería.
Ambulancia Nissan	Sede Centro	1336	Anual	12	6	2019	Coordinador recursos físicos	Revisión técnico mecánica y de gases
Ambulancia Nissan	Sede Centro	1336	Semestral	11-18	5	2019	Coordinador recursos físicos	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque,
				23-30	11	2019		



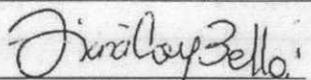
DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO
				1-8	02	2019		SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fueles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO
Unidad móvil Mazda	Sede Centro	1341	Semestral	23-30	11	2019	Coordinador recursos físicos	Mantenimiento General a la carrocería, latonería pintura y

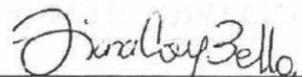
  
DIRECTOR/GERENTE

  
IFFF DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								tapicería.
Unidad móvil Mazda	Sede Centro	1341	Anual	3	12	2019	Coordinador recursos físicos	Revisión técnico mecánica y de gases
Ambulancia Toyota	Sede Centro	1339	- Anual	6-13	7	2019	Coordinador recursos físicos	Reposición o baja por obsolescencia.
				6-13	7	2019		Revisión técnico mecánica y de gases



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

**PLAN DE MANTENIMIENTO A MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL**

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE-Centro

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 03 de Enero de 2019

Vigencia 2019

Recursos asignados para el mantenimiento a muebles de uso administrativo y asistencial. **\$ 31.481.517**

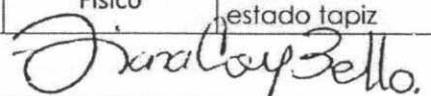
Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Escritorio de madera	Ac_preconsulta_diamante	136	Anual	1	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por estado de estructura debilitada por carcoma en madera
Escritorio de madera	Ac_recepcion_pyp	361	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por estado de estructura debilitada por carcoma en madera
Escritorio de madera	Ac_recepcion_pyp	438	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por estado de estructura debilitada por carcoma en madera
Escritorio de madera	Ac_recepcion_pyp	816	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por estado de estructura debilitada por carcoma en madera
Escritorio de madera	Ac_sala_espera_tercer_piso_pyp	822	Anual	1	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por estado de estructura debilitada por carcoma en madera
Escritorio metálico	Ac_sala_espera_tercer_piso_pyp	137	Anual	1	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por estructura con oxido y corrosión.
Escritorio de madera y cordobán	Ac_preconsulta_diamante	358	Anual	1	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por estado de estructura debilitada por carcoma en madera
Escritorio de madera y cordobán	Ac_recepcion_pyp	819	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por estado de estructura debilitada por carcoma en madera
Escritorio en madera pequeño	Ac_recepcion_pyp	837	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por estado de estructura debilitada por carcoma en madera
Escritorio formica	Ac_recepcion_pyp	844	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion Humedad y hongos en tableros de aglomerado

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR/GERENTE

*Divaldo Zella*  
\_\_\_\_\_  
JEFE DE MANTENIMIENTO

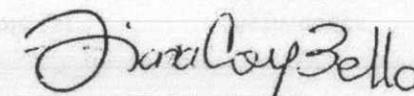
Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Mueble para computador	Ac_recepcion_pyp	1207	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por estado de estructura debilitada por carcoma en madera
Mueble para computador	Ac_recepcion_pyp	1209	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por estado de estructura debilitada por carcoma en madera
Silla giratoria con rodachinas lavable color azul	Ac_sala_espera_tercer_piso_pyp	1201	Anual	1	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla presidente alta	Ac_sala_espera_usi_administrativo	256	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla malasia negra apoya brazos	Ac_sala_espera_usi_administrativo	117	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla giratoria con rodachinas lavable color azul	Ac_sala_espera_usi_administrativo	1084	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla lisa alta contacto lavable tipo cajero color azul	Ac_sala_espera_usi_administrativo	665	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla lisa alta contacto lavable tipo cajero color azul	Ac_sala_espera_usi_administrativo	666	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla giratoria azul lavable con rodachinas	Ac_sala_espera_usi_administrativo	227	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla paño verde de rodachinas	Consultorio_medico_103_usi_centro	89	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla giratoria con rodachinas y paño azul	Consultorio_medico_103_usi_centro	813	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla giratoria con rodachinas y paño azul	Consultorio_medico_103_usi_centro	818	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Silla giratoria con rodachinas y paño azul	Consultorio_medico_103_usi_centro	823	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla malasia negra apoya brazos	Consultorio_medico_103_usi_centro	108	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla interlocutora lavable azul	Consultorio_medico_103_usi_centro	475	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla interlocutora lavable azul	Consultorio_medico_103_usi_centro	494	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla interlocutora lavable azul	Consultorio_medico_103_usi_centro	495	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla cordobán en madera	Consultorio_medico_103_usi_centro	730	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla giratoria lavable azul con rodachinas	Consultorio_medico_103_usi_centro	776	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla giratoria lavable azul con rodachinas	Ac_sala_espera_usi_administrativo	777	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla giratoria lavable azul con rodachinas	Ac_sala_espera_usi_administrativo	779	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla giratoria con rodachinas lavable color azul	Consultorio_medico_103_usi_centro	687	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla giratoria con rodachinas lavable color azul	Consultorio_medico_103_usi_centro	780	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla giratoria con rodachinas lavable color azul	Consultorio_medico_103_usi_centro	829	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz

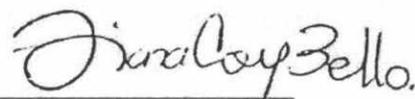
  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Silla giratoria con rodachinas lavable color azul	Consultorio_medico_103_usf_centro	867	Anual	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla giratoria con rodachinas lavable color azul	Consultorio enfermería morca	1259	Anual	2	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Silla giratoria con rodachinas lavable color azul	Ac_laboratorio_usi_centro	1269	ANUAL	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion por daño en el hidráulico, rodachinas y mal estado tapiz
Mueble color blanco en madera dos puertas para empotrar	Administrativo	668	ANUAL	23-30	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion Humedad y hongos en tableros de aglomerado
Archivador tres cajones en madera	Ac_consultorio_medico_pedregal_alto	837	ANUAL	5	07	2019	P.U Ambiente Fisico	Reposicion Madera en mal estado general.
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0135	ANUAL	23-30	8	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MONQUIRA	0138	ANUAL	23-30	8	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAGDALENA	0142	ANUAL	23-30	8	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MAGDALENA	0143	ANUAL	23-30	8	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmto de pintura electrostática, limpieza y desinfección

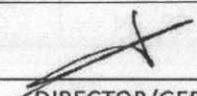


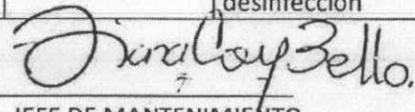
DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

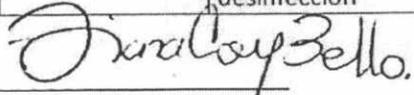
Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
ESCALERILLA DOS PASOS	AC CONSULTORIO _CYD_MAGDALEN A	0145	ANUAL	23-30	8	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC CONSULTORIO _MEDICO_102_M ONQUIRA	0147	ANUAL	23-30	8	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC CONSULTORIO _MEDICO_101_M ONQUIRA	0148	ANUAL	23-30	8	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC CONSULTORIO _ENFERMERIA_M ONQUIRA	0149	ANUAL	23-30	8	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_SALA_ERA_11 3_USI_MONQUIR A	0151	ANUAL	23-30	8	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC CONSULTA_P RORITARIA_MO NQUIRA	0714	ANUAL	16-20	9	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC CONSULTORI O_ODONTOLOGI 109_USI_MONQUI	0750	ANUAL	16-20	9	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC_SALA_ERA_1 13_USI_MONQUIR A	0008	ANUAL	16-20	9	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC CONSULTORI O_MEDICO_101_ MAGDALENA	0010	ANUAL	16-20	9	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección

  
DIRECTOR/GERENTE

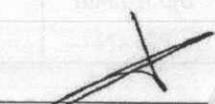
  
JEFE DE MANTENIMIENTO

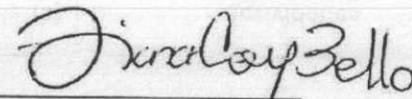
Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CARRO DE CURACIONES	AC CONSULTORIO MEDICO_102_MAGDALENA	0011	ANUAL	16-20	9	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC CONSULTORIO CYD_MAGDALENA	0012	ANUAL	16-20	9	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC VACUNACION_MAGDALENA	0013	ANUAL	16-20	9	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC CONSULTORIO MEDICO_102_MONQUIRA	0014	ANUAL	16-20	9	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC CONSULTORIO MEDICO_101_MONQUIRA	0015	ANUAL	16-20	9	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC CONSULTORIO ENFERMERIA_MONQUIRA	0016	ANUAL	16-20	9	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC VACUNACION_MONQUIRA	0018	ANUAL	16-20	9	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CAMILLA DIVAN	AC CONSULTORIO MEDICO_102_MONQUIRA	0967	ANUAL	14-23	10	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CAMILLA DIVAN	AC CONSULTORIO MEDICO_102_MAGDALENA	1239	ANUAL	14-23	10	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmto de pintura electrostática, limpieza y desinfección

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CAMILLA DIVAN	AC CONSULTORI O_CYD_MAGDAL ENA	1730	ANUAL	14-23	10	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CAMILLA DIVAN	AC CONSULTORI O PSICOLOGIA 4TO PISO PYP	0697	ANUAL	14-23	10	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CAMILLA DIVAN	AC CONSULTORI O NO.305 P Y P	0710	ANUAL	14-23	10	2019	Operario mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmto de pintura electrostática, limpieza y desinfección

  
DIRECTOR/GEREN

  
IEEE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 03 de Enero de 2019

Vigencia 2019

Recursos asignados para el mantenimiento a equipos de comunicaciones e informática. \$67.460.393

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	DD	MM	AA	Responsable (s)	Actividades
CPU-MJ674Y1	FACTURACION	CPU-MJ674Y1	TRIMESTRAL	DEL 5 AL 10	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-VCFK038				DEL 5 AL 10	6	2019		
MOUSE-HS302HD09JC				DEL 5 AL 10	9	2019		
TECLADO-4000026				DEL 5 AL 10	12	2019		
CPU-SR3574Y55	CONSULTORIO MEDICO 1	SR3574Y55	TRIMESTRAL	DEL 5 AL 10	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				DEL 5 AL 10	6	2019		
MOUSE-N/A				DEL 5 AL 10	9	2019		
TECLADO-760991				DEL 5 AL 10	12	2019		

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

	CONSULTORIO MEDICO 2							Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
CPU-SMJ00S6QH			TRIMESTRAL	DEL 5 AL 10	3	2019	AREA DE SISTEMAS	
PANTALLA-V4C2738				DEL 5 AL 10	6	2019		
MOUSE-HS410HD0V6Z				DEL 5 AL 10	9	2019		
TECLADO-00189747		CPU-SMJ00S6QH		DEL 5 AL 10	12	2019		
	CONSULTORIO JEFE ENFERMERA							Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor,
CPU-SMJ00S6P4			TRIMESTRAL	DEL 5 AL 10	3	2019	AREA DE SISTEMAS	
PANTALLA-V4B33772				DEL 5 AL 10	6	2019		
MOUSE-HS336HA0ED3				DEL 5 AL 10	9	2019		
TECLADO-00188748		CPU-SMJ00S6P4		DEL 5 AL 10	12	2019		
	CONSULTORIO ODONTOLOGIA							Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
CPU-SMJ00S6PR			TRIMESTRAL	DEL 5 AL 10	3	2019	AREA DE SISTEMAS	
PANTALLA-V4B3647				DEL 5 AL 10	6	2019		
MOUSE-HS410HD0V6G				DEL 5 AL 10	9	2019		
TECLADO-00189759		CPU-SMJ00S6PR		DEL 5 AL 10	12	2019		

VACUNA DN

CPU-N/A			TRIMESTRAL	DEL 5 AL 10	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-S9Z111700780				DEL 5 AL 10	6	2019		
TECLADO-04408557NF				DEL 5 AL 10	9	2019		
MOUSE-X61352708580		PANTALLA-S9Z111700780		DEL 5 AL 10	12	2019		
TV LCD DE 40-905524541274	TELEVISOR	TV LCD DE 40-905524541274	TRIMESTRAL	DEL 6 AL 11	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo
				DEL 6 AL 11	6	2019		
				DEL 6 AL 11	9	2019		
				DEL 6 AL 11	12	2019		
CPU-1S3157C2SMJLLWDE	FARMACIA	CPU-1S3157C2SMJLLWDE	TRIMESTRAL	DEL 6 AL 11	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V1PMG91				DEL 6 AL 11	6	2019		
MOUSE-123913607117				DEL 6 AL 11	9	2019		
TECLADO-276793				DEL 6 AL 11	12	2019		
CPU-CNX72405RD	FARMACIA 2	CPU-CNX72405RD	TRIMESTRAL	DEL 6 AL 11	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-S9Z111700798				DEL 6 AL 11	6	2019		
MOUSE-PL0719026718				DEL 6 AL 11	9	2019		

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

TECLADO-WE1491025123				DEL 6 AL 11	12	2019		
	CONSULTORIO MEDICO 1						AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
CPU-SMJ00S6QX			TRIMESTRAL	DEL 6 AL 11	3	2019		
PANTALLA- V4C2466				DEL 6 AL 11	6	2019		
MOUSE-HS411HD0VYA		CPU-SMJ00S6QX		DEL 6 AL 11	9	2019		
TECLADO-00188526				DEL 6 AL 11	12	2019		
	CONSULTORIO MEDICO 2						AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
CPU-SMJ00S6QF			TRIMESTRAL	DEL 6 AL 11	3	2019		
PANTALLA-V4B3725				DEL 6 AL 11	6	2019		
MOUSE-HS410HD0V77		CPU-SMJ00S6QF		DEL 6 AL 11	9	2019		
TECLADO-00190601				DEL 6 AL 11	12	2019		
	CONSULTORIO ODONTOLOGICO 1						AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
CPU-SIMAB60			TRIMESTRAL	DEL 6 AL 11	3	2019		
PANTALLA-N/A				DEL 6 AL 11	6	2019		
MOUSE-443299				DEL 6 AL 11	9	2019		
TECLADO-760846		CPU-SIMAB60		DEL 6 AL 11	12	2019		
	CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2						AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
CPU-300SN09189			TRIMESTRAL	DEL 6 AL 11	3	2019		
PANTALLA-V8B3H9NZ900172L				DEL-6 AL 11	6	2019		
TECLADO-04408521NF		CPU-300SN09189		DEL 6 AL 11	9	2019		

MOUSE-N/A				DEL 6 AL 11	12	2019		
	VACUNACION							
CPU-CNX8502FLZ			TRIMESTRAL	DEL 6 AL 11	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V8B3H9NZ900167D				DEL 6 AL 11	6	2019		
TECLADO-BF61421254		CPU-CNX8502FLZ		DEL 6 AL 11	9	2019		
MOUSE-N/A				DEL 6 AL 11	12	2019		
	ENFERMERA							
CPU-SMJ00S6R3			TRIMESTRAL	DEL 7 AL 12	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2822				DEL 7 AL 12	6	2019		
TECLADO-0018534				DEL 7 AL 12	9	2019		
MOUSE-HS411HD0VZR		CPU-SMJ00S6R3		DEL 7 AL 12	12	2019		
	ENFERMERA JEFE							
CPU-300SN09460			TRIMESTRAL	DEL 7 AL 12	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V8B3H9NZ900176Z				DEL 7 AL 12	6	2019		
TECLADO-04409788NF		CPU-300SN09460		DEL 7 AL 12	9	2019		
MOUSE-N/A				DEL 7 AL 12	12	2019		
TELEVISOR DE 40" CON CONTROL REMOTO	TELEVISOR	TELEVISOR DE 40" CON CONTROL REMOTO	TRIMESTRAL	DEL 7 AL 12	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo
				DEL 7 AL 12	6	2019		
				DEL 7 AL 12	9	2019		
				DEL 7 AL 12	12	2019		

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

USI-MAGDALENA.	TELEFONO		TRIMESTRAL	DEL 7 AL 12	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa
		USI-MAGDALENA A.		DEL 7 AL 12	6	2019		
				DEL 7 AL 12	9	2019		
				DEL 7 AL 12	12	2019		
CPU-153264Q1SMJXKKTA	RECEPCION PYP		TRIMESTRAL	DEL 7 AL 12	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-59Z111701334				DEL 7 AL 12	6	2019		
TECLADO-WE1491025138		CPU-153264Q1SMJXKKTA		DEL 7 AL 12	9	2019		
MOUSE-133735808897				DEL 7 AL 12	12	2019		
CPU-MJ0037F3	CONSULTORIO MEDICO 201		TRIMESTRAL	DEL 7 AL 12	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V456895				DEL 7 AL 12	6	2019		
TECLADO-5437255		CPU-MJ0037F3		DEL 7 AL 12	9	2019		
MOUSE-44NW415				DEL 7 AL 12	12	2019		
CPU-SMJ00S6R2	CONSULTORIO NUTRICION 202		TRIMESTRAL	DEL 7 AL 12	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2821				DEL 7 AL 12	6	2019		
TECLADO-00190573				DEL 7 AL 12	9	2019		
MOUSE-HS410HD085C		CPU-SMJ00S6R2		DEL 7 AL 12	12	2019		
CPU-SMJ00S6QN	CONSULTORIO MEDICO 209		TRIMESTRAL	DEL 7 AL 12	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador

							y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2730				DEL 7 AL 12	6	2019	
TECLADO-00189805				DEL 7 AL 12	9	2019	
MOUSE- HS410HD0876				DEL 7 AL 12	12	2019	
CPU-SMJ00S6PY	ENFERMERIA IAMI		TRIMESTRAL	DEL 8 AL 13	3	2019	AREA DE SISTEMAS Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3774				DEL 8 AL 13	6	2019	
TECLADO-001189226				DEL 8 AL 13	9	2019	
MOUSE- HS408HA36SC		CPU- SMJ00S6PY		DEL 8 AL 13	12	2019	
CPU-SMJ00S6QJ	CONSULTORIO MEDICO 302		TRIMESTRAL	DEL 8 AL 13	3	2019	AREA DE SISTEMAS Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2829				DEL 8 AL 13	6	2019	
TECLADO-00190600				DEL 8 AL 13	9	2019	
MOUSE- HS410HD0V6P		CPU- SMJ00S6QJ		DEL 8 AL 13	12	2019	
CPU- 1S3598H5SMJ675D8	CONSULTORIO JEFE ENFERMERA		TRIMESTRAL	DEL 8 AL 13	3	2019	AREA DE SISTEMAS Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V3FH996				DEL 8 AL 13	6	2019	
TECLADO-4036798				DEL 8 AL 13	9	2019	
MOUSE- HS3024DOL83		CPU- 1S3598H5SM J675D8		DEL 8 AL 13	12	2019	

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

CPU-SMJ00S6Q4	HIGIENE ORAL		TRIMESTRAL	DEL 8 AL 13	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2815				DEL 8 AL 13	6	2019		
TECLADO-00189762				DEL 8 AL 13	9	2019		
MOUSE-HS411HD0V9F		CPU-SMJ00S6Q4		DEL 8 AL 13	12	2019		
CPU-MXL1182899	PIC		TRIMESTRAL	DEL 8 AL 13	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-CNC114Q1				DEL 8 AL 13	6	2019		
TECLADO-N/A				DEL 8 AL 13	9	2019		
MOUSE-N/A		CPU-MXL1182899		DEL 8 AL 13	12	2019		
CPU-MXK5490JF7	PIC-2		TRIMESTRAL	DEL 8 AL 13	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-S9Z111700764				DEL 8 AL 13	6	2019		
TECLADO-WE14491025137				DEL 8 AL 13	9	2019		
MOUSE-FF0810000083		CPU-MXK5490JF7		DEL 8 AL 13	12	2019		
CPU-300SN09194	PSICOLOGIA		TRIMESTRAL	DEL 8 AL 13	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V8B3H9NZ900		CPU-300SN09194		DEL 8 AL 13	6	2019		

TECLADO- 04408519NFPS				DEL 8 AL 13	9	2019		
MOUSE- 04407859NFPO				DEL 8 AL 13	12	2019		
CPU- 153264Q1SMJXKKTA	SIAU		TRIMESTRAL	DEL 9 AL 14	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA- 59Z111701334				DEL 9 AL 14	6	2019		
TECLADO- WE1491025138		CPU- 153264Q1SM JXKKTA		DEL 9 AL 14	9	2019		
MOUSE- 133735808897				DEL 9 AL 14	12	2019		
CPU-MJ0037F6	VACUNACION		TRIMESTRAL	DEL 9 AL 14	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V456839				DEL 9 AL 14	6	2019		
TECLADO-5437251		CPU- MJ0037F6		DEL 9 AL 14	9	2019		
MOUSE-44NW425				DEL 9 AL 14	12	2019		
CPU-SMJ00S6PO	VACUNACION-2		TRIMESTRAL	DEL 9 AL 14	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3808				DEL 9 AL 14	6	2019		
TECLADO-00188527				DEL 9 AL 14	9	2019		
MOUSE- HS410HDV59		CPU- SMJ00S6PO		DEL 9 AL 14	12	2019		
TELEVISOR 32"	PROMOCION Y PREVENCION		TRIMESTRAL	DEL 9 AL 14	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa
				DEL 9 AL 14	6	2019		
		TELEVISOR 32"		DEL 9 AL 14	9	2019		
				DEL 9 AL 14	12	2019		

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

TV. 42" S/202RMRH30126	PROMOCION Y PREVENCION	TV. 42" S/202RMRH3 0126	TRIMESTRAL	DEL 9 AL 14	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa
				DEL 9 AL 14	6	2019		
				DEL 9 AL 14	9	2019		
				DEL 9 AL 14	12	2019		
TELEVISOR 32"	PROMOCION Y PREVENCION	TELEVISOR 32"	TRIMESTRAL	DEL 9 AL 14	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa
				DEL 9 AL 14	6	2019		
				DEL 9 AL 14	9	2019		
				DEL 9 AL 14	12	2019		
CPU-MJNHBXX	ALMACEN COMPUTADOR LENOVO	CPU- MJNHBXX	TRIMESTRAL	DEL 9 AL 14	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-VIVK626				DEL 9 AL 14	6	2019		
TECLADO-2929094				DEL 9 AL 14	9	2019		
MOUSE- LZ211HD1085				DEL 9 AL 14	12	2019		
CPU-YA589839Q	ALMACEN COMPUTADOR PORTATIL	CPU- YA589839Q	TRIMESTRAL	DEL 9 AL 14	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				DEL 9 AL 14	6	2019		
TECLADO-N/A				DEL 9 AL 14	9	2019		
MOUSE- 71283350162A02				DEL 9 AL 14	12	2019		
CPU-CNX81203ST	ARCHIVO CENTRAL	CPU- CNX81203ST	TRIMESTRAL	DEL 12 AL 17	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA- V8B3H9N290049SP				DEL 12 AL 17	6	2019		
TECLADO- 2M2515001536				DEL 12 AL 17	9	2019		

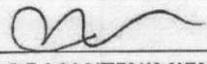
MOUSE-N/A				DEL 12 AL 17	12	2019	
CPU-N/A	AUDITORIA		TRIMESTRAL	DEL 12 AL 17	3	2019	AREA DE SISTEMAS Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA- N/A				DEL 12 AL 17	6	2019	
TECLADO- N/A				DEL 12 AL 17	9	2019	
MOUSE- N/A		CPU-N/A		DEL 12 AL 17	12	2019	
CPU-SMJ00S6PH	CALIDAD		TRIMESTRAL	DEL 12 AL 17	3	2019	AREA DE SISTEMAS Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2732				DEL 12 AL 17	6	2019	
TECLADO-00189773				DEL 12 AL 17	9	2019	
MOUSE- HS410HDOV66J		CPU-SMJ00S6PH		DEL 12 AL 17	12	2019	
CPU-SMJ00G222	COMUNICACION ES		TRIMESTRAL	DEL 12 AL 17	3	2019	AREA DE SISTEMAS Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3786				DEL 12 AL 17	6	2019	
TECLADO-5502230				DEL 12 AL 17	9	2019	
MOUSE- SL84812361B		CPU-SMJ00G222		DEL 12 AL 17	12	2019	

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

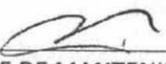
CAMARA DIGITAL S/WD234001- 1500186	COMUNICACION ES		TRIMESTRAL	DEL 12 AL 17	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
				DEL 12 AL 17	6	2019		
		CAMARA DIGITAL S/WD234001- 1500186		DEL 12 AL 17	9	2019		
				DEL 12 AL 17	12	2019		
VIDEO BEAN S/NE6FOZA507L	COMUNICACIONE S		TRIMESTRAL	DEL 12 AL 17	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
				DEL 12 AL 17	6	2019		
		VIDEO BEAN S/NE6FOZA5 07L		DEL 12 AL 17	9	2019		
				DEL 12 AL 17	12	2019		
CPU- 153157C25MINHBDB	CONTABILIDAD		TRIMESTRAL	DEL 12 AL 17	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V1VK604				DEL 12 AL 17	6	2019		
TECLADO-2929395				DEL 12 AL 17	9	2019		
MOUSE- L7211HD15LR		CPU- 153157C25MI NHBDB		DEL 12 AL 17	12	2019		
CPU- 1S3598H5SMJ675E6	CONTRATACION	CPU- 1S3598H5SM J675E6	TRIMESTRAL	DEL 12 AL 17	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor

  
DIRECTOR/GEREI

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

PANTALLA-V3FK015				12 AL 17	6	2019	
TECLADO-4036799				DEL 12 AL 17	9	2019	
MOUSE- HS302H0L5W				DEL 12 AL 17	12	2019	
	CONTROL INTERNO						Limpieza interna y externa del equipo
CPU-SMJ00Q5J5			TRIMESTRAL	DEL 13 AL 18	3	2019	AREA DE SISTEMAS lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA- V4V3687				DEL 13 AL 18	6	2019	
TECLADO- 00190581				DEL 13 AL 18	9	2019	
MOUSE- HS411HD08NV		CPU- SMJ00Q5J5		DEL 13 AL 18	12	2019	
	COORDINACION DE SERVICIOS						Limpieza interna y externa del equipo
CPU- MJ675B5			TRIMESTRAL	DEL 13 AL 18	3	2019	AREA DE SISTEMAS lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V3FK032				DEL 13 AL 18	6	2019	
TECLADO-4036557				DEL 13 AL 18	9	2019	
MOUSE- HS302HD0L8D		CPU- MJ675B5		DEL 13 AL 18	12	2019	
	COORDINACION PIC						Limpieza interna y externa del equipo
CPU- SMJ00QSHW			TRIMESTRAL	DEL 13 AL 18	3	2019	AREA DE SISTEMAS lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C7387				DEL 13 AL 18	6	2019	
TECLADO-00190583		CPU- SMJ00QSHW		DEL 13 AL 18	9	2019	

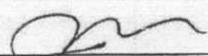
  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

MOUSE- HS411HD08QZ				DEL 13 AL 18	12	2019		
CPU-SMJ00QSHX	COSTOS		TRIMESTRAL	DEL 13 AL 18	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2797				DEL 13 AL 18	6	2019		
TECLADO-00190576				DEL 13 AL 18	9	2019		
MOUSE- HS411HD0UTD		CPU- SMJ00QSHX		DEL 13 AL 18	12	2019		
CPU- 1S3264Q1SMJXKPC	ESCANER		TRIMESTRAL	DEL 13 AL 18	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V1V2B87				DEL 13 AL 18	6	2019		
TECLADO-02705766		CPU- 1S3264Q1SM JXKPC		DEL 13 AL 18	9	2019		
MOUSE-44BN690				DEL 13 AL 18	12	2019		
CPU- 1S3598H5SMJ67565	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		TRIMESTRAL	DEL 13 AL 18	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V3FH981				DEL 13 AL 18	6	2019		
TECLADO-3999967		CPU- 1S3598H5SM J67565		DEL 13 AL 18	9	2019		
MOUSE- HS302HDOJPE				DEL 13 AL 18	12	2019		



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

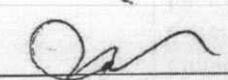
CPU-1S3157C25MJLLWFB	GERENCIA ADMINISTRATIVO		TRIMESTRAL	DEL 13 AL 18	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-VIPPK87				DEL 13 AL 18	6	2019		
TECLADO-2767755		CPU-1S3157C25MJLLWFB		DEL 13 AL 18	9	2019		
MOUSE-L2205A3269D				DEL 13 AL 18	12	2019		
CPU-1S3157C25MJLLWB	PLANEACION		TRIMESTRAL	DEL 13 AL 18	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				DEL 13 AL 18	6	2019		
TECLADO-2766853		CPU-		DEL 13 AL 18	9	2019		
CPU-300SN09376	SALUD PUBLICA		TRIMESTRAL	DEL 13 AL 18	12	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-S9Z111701336				DEL 13 AL 18	3	2019		
TECLADO-WE0691035416				DEL 13 AL 18	6	2019		
MOUSE-FF081000050B		CPU-300SN09376		DEL 13 AL 18	9	2019		
CPU-N/A	SALUD PUBLICA - 2		TRIMESTRAL	DEL 14 AL 19	12	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
		CPU-N/A			3	2019		

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

PANTALLA- CNC726R184				DEL 14 AL 19	6	2019	
TECLADO- 04409475NFPS				DEL 14 AL 19	9	2019	
MOUSE- 0440788NFPO				DEL 14 AL 19	12	2019	
CPU-SMJ00QSJ4	SECRETARIA GERE		TRIMESTRAL	DEL 14 AL 19	3	2019	AREA DE SISTEMAS Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA- V4B3813				DEL 14 AL 19	6	2019	
TECLADO-00189857				DEL 14 AL 19	9	2019	
MOUSE- HS411HD08QL		CPU- SMJ00QSJ4		DEL 14 AL 19	12	2019	
CPU-CNX8122197	SECRE_GERENCI A		TRIMESTRAL	DEL 14 AL 19	3	2019	AREA DE SISTEMAS Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA- V8B3H9N7900161B				DEL 14 AL 19	6	2019	
TECLADO- FF811000WS				DEL 14 AL 19	9	2019	
MOUSE-N/A		CPU- CNX8122197		DEL 14 AL 19	12	2019	
CPU-N/A	LOCALSOG		TRIMESTRAL	DEL 14 AL 19	3	2019	AREA DE SISTEMAS Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V1MB127				DEL 14 AL 19	6	2019	
TECLADO- 04409782NFPS		CPU-N/A		DEL 14 AL 19	9	2019	

  
DIRECTOR/GERE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

MOUSE-K960410797				DEL 14 AL 19	12	2019	
CPU-WB02051601	SISTEMAS_4		TRIMESTRAL	DEL 14 AL 19	3	2019	AREA DE SISTEMAS Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				DEL 14 AL 19	6	2019	
TECLADO-N/A				DEL 14 AL 19	9	2019	
MOUSE- N/A		CPU- WB02051601		DEL 14 AL 19	12	2019	
CPU-SMJ00QJSJ2	SISTEMAS		TRIMESTRAL	DEL 14 AL 19	3	2019	AREA DE SISTEMAS Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3792				DEL 14 AL 19	6	2019	
TECLADO-00190594				DEL 14 AL 19	9	2019	
MOUSE- HS411HD0USS		CPU- SMJ00QJSJ2		DEL 14 AL 19	12	2019	
CPU- 7C047607C	TAL_HUMANO		TRIMESTRAL	DEL 14 AL 19	3	2019	AREA DE SISTEMAS Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				DEL 14 AL 19	6	2019	
TECLADO- G71C0009T210				DEL 14 AL 19	9	2019	
MOUSE-N/A		CPU- 7C047607C		DEL 14 AL 19	12	2019	

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

CPU-SMJ00G02K	TALENTO_HUMANNO	CPU-SMJ00G02K	TRIMESTRAL	DEL 14 AL 19	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3805				DEL 14 AL 19	6	2019		
TECLADO-5501310				DEL 14 AL 19	9	2019		
MOUSE-3L848H0983B				DEL 14 AL 19	12	2019		
CPU-CNX812041M	AUX_TESORERIA	CPU-CNX812041M	TRIMESTRAL	DEL 14 AL 19	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-S9Z111701665				DEL 14 AL 19	6	2019		
TECLADO-48008002752				DEL 14 AL 19	9	2019		
MOUSE-FF08450003RS				DEL 14 AL 19	12	2019		
CPU-MJ675H9	TESORERIA	CPU-MJ675H9	TRIMESTRAL	DEL 14 AL 19	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V3FK004				DEL 14 AL 19	6	2019		
TECLADO-404364				DEL 14 AL 19	9	2019		
MOUSE-HS302HD102C				DEL 14 AL 19	12	2019		
CPU-CNX81203SW	CITAS 1	CPU-CNX81203SW	TRIMESTRAL	DEL 14 AL 19	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

PANTALLA-59Z111700773	CALL CENTER		DEL 14 AL 19	6	2019		
TECLADO-WE1491025132			DEL 14 AL 19	9	2019		
MOUSE-N/A			DEL 14 AL 19	12	2019		
	CITAS 2						Limpieza interna y externa del equipo
CPU-300SN09382			TRIMESTRAL DEL 15 AL 20	3	2019	AREA DE SISTEMAS	lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-S9Z111700787	CALL CENTER		DEL 15 AL 20	6	2019		
TECLADO-BF61421318			DEL 15 AL 20	9	2019		
MOUSE-N/A		CPU-300SN09382	DEL 15 AL 20	12	2019		
	CITAS 3						Limpieza interna y externa del equipo
CPU-N/A			TRIMESTRAL DEL 15 AL 20	3	2019	AREA DE SISTEMAS	lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-S9Z111701348	CALL CENTER		DEL 15 AL 20	6	2019		
TECLADO-328294			DEL 15 AL 20	9	2019		
MOUSE-124761804429		CPU-N/A	DEL 15 AL 20	12	2019		
	CITAS 4						Limpieza interna y externa del equipo
CPU-MJNHBNW			TRIMESTRAL DEL 15 AL 20	3	2019	AREA DE SISTEMAS	lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-VIVKG06	VENTANILLA 1		DEL 15 AL 20	6	2019		
TECLADO-2929080		CPU-MJNHBNW	DEL 15 AL 20	9	2019		

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

MOUSE-LZ211HD1SK5				DEL 15 AL 20	12	2019		
	CITAS 5							
CPU-CNX72523QX			TRIMESTRAL	DEL 15 AL 20	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-S9Z111701334	VENTANILLA 2			DEL 15 AL 20	6	2019		
TECLADO-WE1491025138				DEL 15 AL 20	9	2019		
MOUSE-44C8556		CPU-CNX72523QX		DEL 15 AL 20	12	2019		
	CONSULTORIO MEDICO 1							
CPU-SMJ00S6P5			TRIMESTRAL	DEL 15 AL 20	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C7333				DEL 15 AL 20	6	2019		
TECLADO-00189756	MEDICIN_1_CENT			DEL 15 AL 20	9	2019		
MOUSE-HS410HD0V5C		CPU-SMJ00S6P5		DEL 15 AL 20	12	2019		
	CONSULTORIO MEDICO 2							
CPU-SMJ00S6PG			TRIMESTRAL	DEL 15 AL 20	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3789				DEL 15 AL 20	6	2019		
TECLADO-00189822	MEDICNA_102			DEL 15 AL 20	9	2019		
MOUSE-HS411HD0V60		CPU-SMJ00S6PG		DEL 15 AL 20	12	2019		

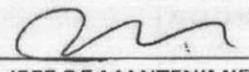
CPU- SMJ00S6PA	CONSULTORIO MEDICO 3		TRIMESTRAL	DEL 15 AL 20	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2792				DEL 15 AL 20	6	2019		
TECLADO- 00190566	MEDICINA_103_CEN			DEL 15 AL 20	9	2019		
MOUSE- HS411HD0V7R		CPU- SMJ00S6PA		DEL 15 AL 20	12	2019		
CPU-SMJ00S6QV	CONSULTORIO MEDICO 4		TRIMESTRAL	DEL 15 AL 20	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3703				DEL 15 AL 20	6	2019		
TECLADO-00190596	MEDIC_4_CENTRO			DEL 15 AL 20	9	2019		
MOUSE- HS409HA0EQM		CPU- SMJ00S6QV		DEL 15 AL 20	12	2019		
CPU-SMJ00S6QE	CONSULTORIO MEDICO 5		TRIMESTRAL	DEL 15 AL 20	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3701				DEL 15 AL 20	6	2019		
TECLADO-00189763	MEDICINA_105_CE			DEL 15 AL 20	9	2019		
MOUSE- HS410HD0V62		CPU- SMJ00S6QE		DEL 15 AL 20	12	2019		
CPU-SMJ00S6QB	CONSULTORIO MEDICO 6	CPU- SMJ00S6QB	TRIMESTRAL	DEL 16 AL 21	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

PANTALLA-V4C2815			DEL 16 AL 21	6	2019		
TECLADO-00189762	MEDICINA_112		DEL 16 AL 21	9	2019		
MOUSE-HS411HD0V9F			DEL 16 AL 21	12	2019		
CPU-1S3264Q1SMJXKKNV	CONSULTORIO MEDICO 7		TRIMESTRAL DEL 16 AL 21	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-S9Z111700824			DEL 16 AL 21	6	2019		
TECLADO-02704723	CONSULTORIO 7		DEL 16 AL 21	9	2019		
MOUSE-44BH200		CPU-1S3264Q1SMJXKKNV	DEL 16 AL 21	12	2019		
CPU-SMJ00S6QL	ENFERMERA_CENT		TRIMESTRAL DEL 16 AL 21	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3722			DEL 16 AL 21	6	2019		
TECLADO-00190599			DEL 16 AL 21	9	2019		
MOUSE-HS410HD0V5P		CPU-SMJ00S6QL	DEL 16 AL 21	12	2019		
CPU-CNX812031C	FARMACIA		TRIMESTRAL DEL 16 AL 21	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-S9Z111700803			DEL 16 AL 21	6	2019		
TECLADO-01714959NF		CPU-CNX812031C	DEL 16 AL 21	9	2019		

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

MOUSE-1714959				DEL 16 AL 21	12	2019	
CPU- MJLLVWW	FARMACIA1		TRIMESTRAL	DEL 16 AL 21	3	2019	AREA DE SISTEMAS Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-VIPMA65				DEL 16 AL 21	6	2019	
TECLADO-2767794				DEL 16 AL 21	9	2019	
MOUSE-LZ205A325VH		CPU-MJLLVWW		DEL 16 AL 21	12	2019	
CPU- SMJ0056R5	FARMACIA_1		TRIMESTRAL	DEL 16 AL 21	3	2019	AREA DE SISTEMAS Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3678				DEL 16 AL 21	6	2019	
TECLADO-00188746				DEL 16 AL 21	9	2019	
MOUSE-HS411HA1KAS		CPU-SMJ0056R5		DEL 16 AL 21	12	2019	
CPU- SMJ00S6R5	HIGIENE_ORAL_CE		TRIMESTRAL	DEL 16 AL 21	3	2019	AREA DE SISTEMAS Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3678				DEL 16 AL 21	6	2019	
TECLADO-00189818				DEL 16 AL 21	9	2019	
MOUSE-HS410HD0868		CPU-SMJ00S6R5		DEL 16 AL 21	12	2019	

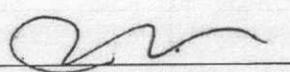
  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

CPU- SMJ00S6QC	LABORATORIO	CPU- SMJ00S6QC	TRIMESTRAL	DEL 16 AL 21	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3721	CLINICO 1			DEL 16 AL 21	6	2019		
TECLADO-00190629				DEL 16 AL 21	9	2019		
MOUSE- HS410HD0085D	LABORATORIO_1			DEL 16 AL 21	12	2019		
CPU-CNX72405R6	LABORATORIO CLINICO 2	CPU- CNX72405R6	TRIMESTRAL	DEL 16 AL 21	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA- 59Z111701351				DEL 16 AL 21	6	2019		
TECLADO- WF1491025134	LABORATORIO2			DEL 16 AL 21	9	2019		
MOUSE-K960411452				DEL 16 AL 21	12	2019		
CPU- SMJ00S6QG	LABORATORIO	CPU- SMJ00S6QG	TRIMESTRAL	DEL 19 AL 24	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2726	CLINICO 3			DEL 19 AL 24	6	2019		
TECLADO-00190614				DEL 19 AL 24	9	2019		
MOUSE- HS411HD08Z2	LABORATORIO_3			DEL 19 AL 24	12	2019		
CPU-300SN09439	CONSULTORIO ODONTOLOGIA 1	CPU- 300SN09439	TRIMESTRAL	DEL 19 AL 24	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

PANTALLA- V8B3H9NZ900152A			DEL 19 AL 24	6	2019		
TECLADO- 04408581NF	ODONTOLOGIA1		DEL 19 AL 24	9	2019		
MOUSE-04408146NF			DEL 19 AL 24	12	2019		
	CONSULTORIO ODONTOLOGIA 2						Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
CPU-300SN09247			TRIMESTRAL DEL 19 AL 24	3	2019	AREA DE SISTEMAS	
PANTALLA-			DEL 19 AL 24	6	2019		
V8B3H9NZ900170W	ODONTOLOGIA2		DEL 19 AL 24	9	2019		
TECLADO- 04409397NF		CPU- 300SN09247	DEL 19 AL 24	12	2019		
	CONSULTORIO ODONTOLOGIA 3						Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
CPU-300SN09456			TRIMESTRAL DEL 19 AL 24	3	2019	AREA DE SISTEMAS	
PANTALLA- V8B3H9NZ900156N			DEL 19 AL 24	6	2019		
TECLADO- 04408510NF	ODONTOLOGIA3		DEL 19 AL 24	9	2019		
MOUSE-N/A		CPU- 300SN09456	DEL 19 AL 24	12	2019		
	PROCEDIMIENTO S						Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
CPU- 1S326Q1SMJXKKNY			TRIMESTRAL DEL 19 AL 24	3	2019	AREA DE SISTEMAS	
PANTALLA- CNC726R194			DEL 19 AL 24	6	2019		
TECLADO-2705767		CPU- 1S326Q1SMJ XKKNY	DEL 19 AL 24	9	2019		

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

MOUSE-144711900151				DEL 19 AL 24	12	2019		
CPU-421321Q	ENFERMERA_MO VIL		TRIMESTRAL	DEL 19 AL 24	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				DEL 19 AL 24	6	2019		
TECLADO- N/A				DEL 19 AL 24	9	2019		
MOUSE- N/A		CPU-421321Q		DEL 19 AL 24	12	2019		
CPU-XD420297Q	ENFERMR_PERIFE		TRIMESTRAL	DEL 19 AL 24	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				DEL 19 AL 24	6	2019		
TECLADO- N/A				DEL 19 AL 24	9	2019		
MOUSE- N/A		CPU- XD420297Q		DEL 19 AL 24	12	2019		
CPU-XD421321Q	MEDICO_MOVIL		TRIMESTRAL	DEL 19 AL 24	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				DEL 19 AL 24	6	2019		
TECLADO- N/A				DEL 19 AL 24	9	2019		
MOUSE- N/A		CPU- XD421321Q		DEL 19 AL 24	12	2019		

CPU-XD420202Q	ODONTOLÓGICO R		TRIMESTRAL	DEL 19 AL 24	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				DEL 19 AL 24	6	2019		
TECLADO- N/A				DEL 19 AL 24	9	2019		
MOUSE- N/A		CPU- XD420202Q		DEL 19 AL 24	12	2019		
CPU-XD420342	ODONTOLOGICO_M OVI		TRIMESTRAL	DEL 20 AL 25	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				DEL 20 AL 25	6	2019		
TECLADO- N/A				DEL 20 AL 25	9	2019		
MOUSE- N/A		CPU- XD420342		DEL 20 AL 25	12	2019		
CPU-7C050177C	SISTEMAS COMPUTADOR PORTATIL		TRIMESTRAL	DEL 20 AL 25	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
				DEL 20 AL 25	6	2019		
				DEL 20 AL 25	9	2019		
		CPU- 7C050177C		DEL 20 AL 25	12	2019		
CPU-7C0470280	SISTEMAS COMPUTADOR PORTATIL		TRIMESTRAL	DEL 20 AL 25	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor

  
DIRECTOR/GERENTE

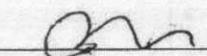
  
JEFE DE MANTENIMIENTO

				DEL 20 AL 25	6	2019		
				DEL 20 AL 25	9	2019		
				DEL 20 AL 25	12	2019		
CPU-7C047614C	PORTERIA 1 USI CENTRO COMPUTADOR PORTATIL		TRIMESTRAL	DEL 20 AL 25	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
				DEL 20 AL 25	6	2019		
				DEL 20 AL 25	9	2019		
		CPU- 7C047614C		DEL 20 AL 25	12	2019		
CPU-7C050259C	ACREDITACION		TRIMESTRAL	DEL 20 AL 25	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
				DEL 20 AL 25	6	2019		
				DEL 20 AL 25	9	2019		
		CPU- 7C050259C		DEL 20 AL 25	12	2019		
CPU-7C047621CP	SISTEMAS COMPUTADOR PORTATIL		TRIMESTRAL	DEL 20 AL 25	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
				DEL 20 AL 25	6	2019		
				DEL 20 AL 25	9	2019		
		CPU- 7C047621CP		DEL 20 AL 25	12	2019		

CPU-WB02051601	SISTEMA COMPUTADOR PORTATIL		TRIMESTRAL	DEL 20 AL 25	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
				DEL 20 AL 25	6	2019		
				DEL 20 AL 25	9	2019		
		CPU- WB02051601		DEL 20 AL 25	12	2019		
HP_LASERJET_M121 2NF CND8BBD10W	IMPRESORA- ALMACEN		TRIMESTRAL	DEL 20 AL 25	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metalicas
				DEL 20 AL 25	6	2019		
		HP_LASERJE T_M1212NF CND8BBD10W		DEL 20 AL 25	9	2019		
				DEL 20 AL 25	12	2019		
HP_LASERJET_M121 2NF CNG8BBPTLM	IMPRESORA- AUDITORIA		TRIMESTRAL	DEL 20 AL 25	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
				DEL 20 AL 25	6	2019		
		HP_LASERJE T_M1212NF CNG8BBPTLM		DEL 20 AL 25	9	2019		
				DEL 20 AL 25	12	2019		
BIXOLON-	IMPRESORA VENTANILLA 2		TRIMESTRAL	DEL 20 AL 25	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
IMPPNKA11020387				DEL 20 AL 25	6	2019		
		BIXOLON-		DEL 20 AL 25	9	2019		

				DEL 20 AL 25	12	2019		
BIXOLON-	IMPRESORA VENTANILLA 1		TRIMESTRAL	DEL 21 AL 26	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
IMPPNKA11020386				DEL 21 AL 26	6	2019		
				DEL 21 AL 26	9	2019		
		BIXOLON-		DEL 21 AL 26	12	2019		
HP LASERJET P1005-	IMPRESORA CONTABILIDAD		TRIMESTRAL	DEL 21 AL 26	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
BRB58BY2SN				DEL 21 AL 26	6	2019		
				DEL 21 AL 26	9	2019		
		HP LASERJET P1005-		DEL 21 AL 26	12	2019		
HP LASERJET P1005- VND4H00196	IMPRESORA CONTROL INTERNO		TRIMESTRAL	DEL 21 AL 26	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
				DEL 21 AL 26	6	2019		
		HP LASERJET P1005- VND4H00196		DEL 21 AL 26	9	2019		
				DEL 21 AL 26	12	2019		
HP LASERJET M1212NF	IMPRESORA COORDINACION DE SERVICIOS		TRIMESTRAL	DEL 21 AL 26	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
-CNG9C8D15B		HP LASERJET M1212NF		DEL 21 AL 26	6	2019		

  
DIRECTOR/GEREN

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

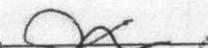
			DEL 21 AL 26	9	2019		
			DEL 21 AL 26	12	2019		
HP LASER JET 600	IMPRESORA FARMACIA		TRIMESTRAL DEL 21 AL 26	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
M602			DEL 21 AL 26	6	2019		
			DEL 21 AL 26	9	2019		
		HP LASER JET 600	DEL 21 AL 26	12	2019		
BIXOLON- IMPPNKA11020385	IMPRESORA FARMACIA		TRIMESTRAL DEL 21 AL 26	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
			DEL 21 AL 26	6	2019		
			DEL 21 AL 26	9	2019		
		BIXOLON- IMPPNKA1102 0385	DEL 21 AL 26	12	2019		
LEXMARK-E140640	IMPRESORA GERENCIA		TRIMESTRAL DEL 21 AL 26	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
			DEL 21 AL 26	6	2019		
			DEL 21 AL 26	9	2019		
		LEXMARK- E140640	DEL 21 AL 26	12	2019		
HP LASERJET P1005- VNB5G00495	IMPRESORA LABORATORIO	HP LASERJET P1005- VNB5G00495	TRIMESTRAL DEL 21 AL 26	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

				DEL 21 AL 26	6	2019		
				DEL 21 AL 26	9	2019		
				DEL 21 AL 26	12	2019		
HP LASERJET M1212NF	IMPRESORA SECRETARIA DE GERENCIA		TRIMESTRAL	DEL 21 AL 26	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
-CNT8BBD107				DEL 21 AL 26	6	2019		
				DEL 21 AL 26	9	2019		
		HP LASERJET M1212NF		DEL 21 AL 26	12	2019		
HP LASERJET P1005- BRB58BY2XT	IMPRESORA SIAU		TRIMESTRAL	DEL 21 AL 26	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
				DEL 21 AL 26	6	2019		
				DEL 21 AL 26	9	2019		
		HP LASERJET P1005- BRB58BY2XT		DEL 21 AL 26	12	2019		
BIXOLON- IMPPNKA11020416	IMPRESORA RECEPCION PYP		TRIMESTRAL	DEL 21 AL 26	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
				DEL 21 AL 26	6	2019		
				DEL 21 AL 26	9	2019		
		BIXOLON- IMPPNKA1102 0416		DEL 21 AL 26	12	2019		
SAMSUNG_ML_1865 W	IMPRESORA RECEPCION PYP	SAMSUNG_M L_1865W	TRIMESTRAL	DEL 21 AL 26	3	2019	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo,

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE MANTENIMIENTO

							lubricación de partes metálicas
-Z5RNBKAB400988R				DEL 21 AL 26	6	2019	
				DEL 21 AL 26	9	2019	
				DEL 21 AL 26	12	2019	
SAMSUNG_MIL_2240	IMPRESORA			DEL 21 AL 26	3	2019	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
	TESORERIA	SAMSUNG_MIL_2240	TRIMESTRAL	DEL 21 AL 26	6	2019	AREA DE SISTEMAS

  
 DIRECTOR/GERENTE

  
 JEFE DE MANTENIMIENTO